

CATALOGUE DES PRODUITS 2020



45ans
1975-2020
amoena

Tout a commencé il y a 45 ans à Rosenheim, en Allemagne. Cornelius Rechenberg, un nouveau venu en plasturgie, a créé une prothèse mammaire en silicone pour fournir aux femmes une solution à l'apparence plus naturelle pour remplacer un sein suite à une chirurgie pour un cancer du sein. C'est ainsi que naît Amoena, avec la sortie de cette première prothèse mammaire en silicone. C'était le début d'une entreprise inspirante, mais aussi le début d'une magnifique communauté qui célèbre et qui se consacre à la beauté de la vie des femmes.

amoena
Soutenir la confiance



VISION

Soutenir la confiance des femmes, afin de vivre une vie épanouie après un diagnostic de cancer du sein et pour celles souffrant d'asymétrie mammaire.

MISSION

Être le partenaire de confiance numéro un pour soutenir la confiance des femmes.

NOS VALEURS

LES FEMMES D'ABORD

Nous nous impliquons, nous écoutons, nous soutenons les femmes atteintes d'un cancer du sein dans leur cheminement. Nous veillons à ses besoins et ses demandes, et nous nous efforçons de lui donner une voix et un espace pour faire front commun.

PASSION

Nous sommes passionnés par le fait de soutenir la confiance et l'image corporelle des femmes, car nous nous engageons à faire une véritable différence dans leur vie.

RESPECT

Nous bâtissons des liens sur des bases de respect et d'honnêteté avec notre clientèle, nos partenaires et entre nous. Nous célébrons la diversité et l'individualité, en ayant l'esprit et le cœur ouverts.

VOLONTÉ ET AMBITION

Nous repoussons les limites en matière d'innovation et notre programme est ambitieux. Nous sommes fiers du rôle que nous jouons et nous célébrons les avancées afin de mieux soutenir notre clientèle. Repousser les limites est dans notre ADN.

TABLE DES MATIÈRES

SPÉCIALISTES EN AJUSTEMENT	4
Progression des besoins	4
Communication et Prise en Charge	6
SOINS POSTOPÉRATOIRES	7
PurFit et Prothèses Postopératoires	8
Vêtements de compression	10
Vêtements postopératoires	14
Foulards	17
PROTHÈSES MAMMAIRES ET COMPLÉMENTS	20
Technologie de conception	21
Prothèses mammaires et entretien	22
Prothèses Premium	24
Prothèses Avancées	30
Prothèses de Base	37
Compléments mammaires	39
Autres prothèses et entretien des prothèses	42
Accessoires pour prothèses mammaires	43
VÊTEMENTS	45
Lingerie	46
Accessoires de lingerie	69
Active	70
Loisirs	72
Maillots	74
RESSOURCES	80
Caractéristiques textiles	81
Tableau des tailles pour les compléments Balance	82
Tableau des tailles pour la lingerie et les maillots	83
Tableau des tailles pour prothèses mammaires et guide de conversion	84



À travers ce guide, vous trouverez des trucs et des idées qui viennent de spécialistes en ajustement, comme vous.

PROGRESSION DES BESOINS

Avec Amoena, vous pouvez fournir des solutions à vos clientes, tout au long de leur cheminement après leur diagnostic de cancer du sein. Bien comprendre la progression des besoins vous aidera à établir une relation de confiance avec votre cliente pour des années à venir.

DURANT LE TRAITEMENT ET AU DÉBUT DE LA CONVALESCENCE

PROTHÈSES MAMMAIRES



Premium Priform



Prothèse Loisir

Les Prothèses Loisir ou Priforms procurent à votre cliente une symétrie douce et confortable dès le début – pour un sentiment de confiance et de sécurité.

VÊTEMENTS



*Cami Postopératoire
Hannah*



*Soutien-Gorge
Postopératoire Hannah*



*Camisole de
Compression Leyla*



Foulard Daylily


Les vêtements postopératoires sont incroyablement doux pour un confort optimal.

Les vêtements de compression offrent du support pendant le processus de guérison.


Des soutiens-gorge en coton doux, avec une fermeture avant, pour un support confortable pendant la guérison et pendant la radiothérapie ou la chimiothérapie

Prothèses mammaires après une mastectomie

Les prothèses mammaires en silicone comblent le vide du sein manquant. Elles se portent à l'intérieur des pochettes du soutien-gorge ou directement sur la peau.

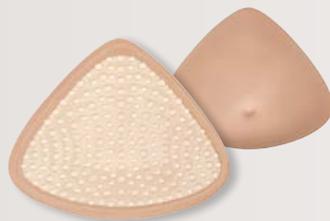

Contact

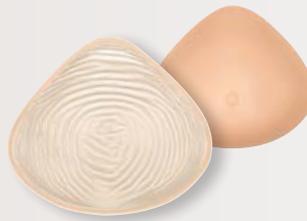

Natura Cosmetic



Adapt Air

Compléments mammaires après une tumorectomie

Les compléments mammaires en silicone viennent équilibrer l'asymétrie mammaire après une tumorectomie, une reconstruction ou de multiples biopsies, ou lors d'une asymétrie naturelle.



Balance Oval



Balance Delta



Balance Ellipse

Les soutiens-gorge à pochettes Amoena sont conçus pour le confort d'une femme. Il y en a pour tous les goûts. Des soutiens-gorge confortables sans couture, élégants et féminins dans des tissus et des finitions luxueuses.



Mara



Karolina



Power Cami Sports

Nous offrons également une ligne mode, pour rester confortable peu importe le moment de la journée. Tous les vêtements sont pourvus de soutiens-gorge à pochettes qui maintiennent en place une prothèse ou un complément mammaire.



Isadora



Valletta Haut



Amber Camisole



Key West

COMMUNICATION ET PRISE EN CHARGE

L'ajustement d'une prothèse mammaire comporte des défis. Mieux vous connaissez votre cliente, plus vous trouverez facilement la solution pour elle. Voici quelques questions importantes que vous devriez poser avant de commencer l'ajustement.

INFORMATION POUR LES
SPÉCIALISTES EN AJUSTEMENT



VOTRE CHIRURGIE DATE DE COMBIEN DE TEMPS ?

Si c'est moins de six semaines, il vaut mieux l'ajuster avec une prothèse Loisir ou Priform, jusqu'à ce que toutes les cicatrices soient complètement guéries.

PORTEZ-VOUS ACTUELLEMENT UNE PROTHÈSE MAMMAIRE ?

Ne la jugez pas; elle fait de son mieux et peut ne pas connaître ses nombreuses options Amoena.

VOUS AIMEZ PORTER QUEL STYLE DE SOUTIEN-GORGE ?

Savoir ce qu'elle porte habituellement comme soutien-gorge vous aidera pour commencer l'ajustement avec un style de soutien-gorge qu'elle aime et a déjà porté.

PRATIQUEZ-VOUS DES ACTIVITÉS/LOISIRS ?

Être au courant de comment elle occupe son temps vous aidera à lui proposer les bons produits pour elle. Voir différentes suggestions ci-dessous

AVEZ-VOUS DES ALLERGIES ?

Les produits Amoena sont testés et doux pour la peau, mais si sa peau est extrêmement sensible, on doit porter une attention particulière.

DEMANDEZ

ÉCOUTEZ

DEMANDEZ ENCORE

ALLEZ PLUS LOIN.
AVEC UNE CONVERSATION.

Qu'est-ce que vous aimez faire avant votre chirurgie?

Parlez-moi de votre famille.

Comment et où aimez-vous partir en vacances?

SOINS POSTOPÉRATOIRES

CONFORTABLE DÈS LE DÉBUT

Nos produits postopératoires sont spécifiquement conçus pour protéger et encourager la récupération durant la convalescence, tout en aidant votre cliente à guérir et à reprendre une vie active



COMPLÉMENT AJUSTABLE PURFIT

Idéal durant une reconstruction, lorsqu'elle a besoin d'une transformation en toute élégance



PURFIT

Style 333
Tailles 4, 6, 8, 10, 12

- Conçu pour assurer forme et symétrie durant le processus d'expansion tissulaire lors d'une reconstruction
- Alors que le processus d'expansion tissulaire a lieu, le volume de la prothèse peut s'ajuster au volume de l'autre sein ou au volume désiré en ajoutant ou en retirant des fibres
- L'enveloppe amovible se lave facilement pour assurer un environnement propre et hygiénique
- Ultraléger pour un confort optimal au quotidien
- Insert en silicone qui se porte aussi comme complément

CARACTÉRISTIQUES		FONCTION
	Revêtement en tissu doux pour la peau	Lavable, confortable et surtout, doux sur la peau sensible
	Insert de silicone souple	Offre une symétrie retrouvée
	Pochette facile d'accès pour le rembourrage en fibre	S'ajuste au volume requis pour retrouver un équilibre lors du processus d'expansion

COMMENT FONCTIONNE LE COMPLÉMENT AMOENA PURFIT



La patiente est aux premiers stades d'expansion tissulaire sur son côté gauche, et elle est à la recherche de volume afin de trouver la symétrie avec son sein naturel et ainsi pouvoir remplir complètement le bonnet de son soutien-gorge, et se sentir plus en confiance.



En utilisant la fibre de rembourrage, le complément ajustable Amoena PurFit est ajusté au volume désiré, et il est placé au-dessus de la prothèse d'expansion. La coquille de silicone permet une forme naturelle.



Le complément remplit entièrement le bonnet, aidant ainsi la patiente à se sentir en sécurité et en confiance pendant le processus d'expansion, grâce à une silhouette symétrique.



COQUILLE PURFIT EN TISSU

Style 034
Tailles 4 (XS); 6 (S); 8 (M); 10 (L); 12 (XL)

- Même coquille faite de tissu souple que celle vendue avec le complément ajustable PurFit
- Le tissu respirant fournit un environnement hygiénique; parfait comme coquille de remplacement ou supplémentaire
- Conçue pour une utilisation avec l'ensemble complet de compléments ajustables PurFit



FIBRES DE REMBOURRAGE POUR PURFIT

Style 033
Emballage 1 sac

- Fibres de rembourrage additionnelles pour une utilisation avec le complément ajustable PurFit, afin d'augmenter la taille du complément au volume souhaité

PROTHÈSES POSTOPÉRATOIRES

Une symétrie retrouvée dès les premiers stades de la convalescence



PREMIUM PRIFORM

Style 216
Tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14
Composition Avant : 100 % Polyester
Arrière : 100 % Coton



- Une prothèse temporaire conçue pour un usage immédiat après une chirurgie du sein ou pour les moments de répit
- Un design s'inspirant d'un bonnet moulé pour offrir un fini doux et lisse dans la pochette d'un soutien-gorge postopératoire ou d'une camisole Amoena
- Remplie de fibre légère. Le volume peut être ajusté en ajoutant ou en enlevant des fibres.
- L'arrière est en coton doux pour la peau et permet le passage de l'air
- Idéal pour restaurer la silhouette durant le processus de guérison en attendant une prothèse permanente
- Fibres additionnelles incluses dans l'emballage



PROTHÈSE DE LOISIR EN MOUSSE CALIBRÉE

Style 132N
Tailles 3-14
Composition Mousse calibrée : 30 % Polyuréthane,
70 % Barium Sulfate (7727-43-7)
Couverture : 82 % Nylon, 18 % Spandex



- La mousse de polyuréthane est légèrement lestée avec du sulfate de baryum (7727-43-7), un minéral naturel sous forme de poudre
- Le revêtement en tissu ultradoux amovible et lavable aide à maintenir un environnement propre
- Prothèse idéale pour dormir

Une prothèse Priform ne remplace pas une prothèse mammaire en silicone, qui elle, est conçue pour un usage quotidien à long terme et qui procure à votre corps l'équilibre approprié.

Nouveau

SOINS POSTOPÉRATOIRES

LEYLA

POST-CHIRURGIE SOUTIEN-GORGE DE COMPRESSION PRÉPARÉE DE FAÇON HYGIÉNIQUE

PRÉLAVÉ ET EMBALLÉ
POUR UNE UTILISATION
DIRECTEMENT
EN CLINIQUE



En savoir plus –
Découvrez notre vidéo informatif
au amoena.com/us-en/Leyla

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes
bilatérales

△
Sans
pochettes

☁
Haute teneur
en coton

VÊTEMENTS DE COMPRESSION



LEYLA

Soutien-gorge de compression sans couture

Style 44605  Blanc

44606  Noir

Tailles 32/34; 36/38; 40/42; 44/46; 48/50
Voir le tableau ci-dessous pour une mesure précise


Bonnets Universel (Taille Unique)

Composition 49 % Nylon, 43 % Coton, 8 % Spandex



Conçu pour soutenir et favoriser l'après-chirurgie pour de nombreuses conditions :

- Reconstruction mammaire
- Chirurgie conservatrice du sein / Tumorectomie
- Mastectomie
- Réduction mammaire
- Augmentation mammaire
- Lifting des seins
- Chirurgie oncoplastique du sein

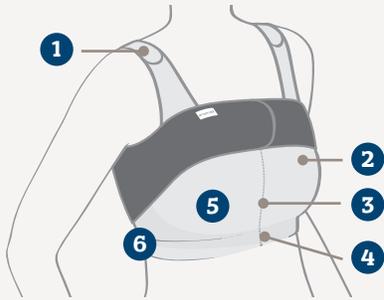

1. Bretelles larges et ajustables avec attaches à boucles pour un ajustement facile et un port confortable

2. Conception sans couture utilisant un matériel solide et extensible, offrant une faible compression

3. Fermeture zippée avant pour un accès facile au site chirurgical avec un rabat à agrafes pour plus de sécurité


4. Le rabat en tissu doux au bas de la fermeture à glissière empêche le frottement sur la peau sensible

5. Les pochettes sans couture maintiennent une prothèse postopératoire bien en place

6. Zones de stabilisation ciblées qui contribuent à un flux lymphatique optimal autour du torse

7. Tissu doux de haute qualité, léger et confortable sur la peau sensible

8. La bande de compression (vendue séparément) stabilise la zone de la poitrine, et se fixe facilement au rabat à boucles à l'arrière pour aider à la maintenir en place

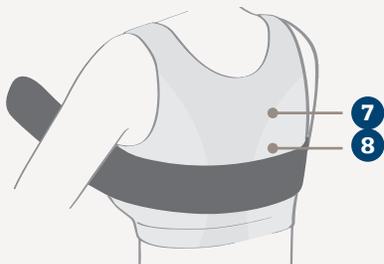

Le soutien-gorge Leyla est préparé hygiéniquement avec un prélavage et un processus de désinfection. Il est emballé dans un sac scellé pour une utilisation directement en clinique.

Un code de couleurs vous aide à facilement identifier la bonne taille dans votre inventaire.

MESURE SOUS-BUSTE					
Centimètres	68-77	78-87	88-97	98-107	108-117
Pouces	27-30	31-34	35-38	39-42	43-46

BONNET UNIVERSEL – TAILLE UNIQUE					
Taille de soutien-gorge	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
Symbole					

VÊTEMENTS DE COMPRESSION



SARAH (aucune pochette)



Camisole de compressions avec fermeture à agrafes à l'avant

Style 0778 Blanc

0779 Noir

Tailles 34-46 A, B, C, D, DD

Agrafes 7 rangées : 34 A

8 rangées : 36-38 A; 34-36 B; 34 C

9 rangées : 40-42 A; 38-40 B; 36-38 C;
34-36 D; 34 DD

10 rangées : 44-46 A; 42-44 B; 40-42 C;
38-40 D; 36-38 DD

11 rangées : 46 B; 44-46 C; 42-44 D; 40-42 DD

12 rangées : 46 D; 44-46 DD

Composition 62 % Coton, 24 % Nylon, 14 % Spandex



- Deux couches à haute teneur en coton à l'avant
- Moulés, les bonnets ne renferment aucune pochette et les coutures sont plates pour atténuer l'irritation
- Bande élastique souple conçue pour ne pas rouler vers le haut
- Bretelles larges, ajustables avec fermeture avant autoagrippante de marque VELCRO®
- Sac de Drainage Amovible qui se fixe à la sous-bande. Vendu séparément, p. 16
- Un rabat au dos permet à la bande de compression Amoena de s'y fixer facilement. Le rabat peut être plié lorsqu'il ne sert pas. Bande de compression vendue séparément, p.13

CARACTÉRISTIQUES


Pochettes
bilatérales


Sans
pochettes


Haute teneur
en coton

VÊTEMENTS DE COMPRESSION



Tailles	Tour de buste
30	Jusqu'à 26 1/2 po
32	26 3/4 - 28 1/2 po
34	28 3/4 - 30 1/2 po
36	30 3/4 - 32 1/2 po
38	32 3/4 - 34 1/2 po
40	34 3/4 - 36 1/2 po
42	36 3/4 - 38 po
44	38 1/4 - 40 po

BANDE DE COMPRESSION

Recommandée avec le soutien-gorge de compression Leyla, Sarah et Patricia.


Style 0776N Blanc
0789N Noir

Tailles 30-44

Composition 72 % Nylon, 14 % Polyester,
8 % Coton, 6 % Spandex

Indications Reconstruction mammaire
Augmentation mammaire
Réduction mammaire

- La coupe est conçue pour assurer un résultat optimal de la en immobilisant le ou les seins opérés et en empêchant la migration des implants pendant le processus de guérison
- Forme anatomique faite de tissu élastique résistant, pour un ajustement et une compression optimum de la partie supérieure de la poitrine
- Ne cause pas de marques ou d'irritation grâce a des tissus doux pour la peau. Fermeture à VELCRO® à l'avant pour un ajustement simple et personnalisable
- Le rabat au dos permet à la bande de compression Amoena de se fixer facilement et de façon sécuritaire au vêtement. Le rabat peut être plié lorsqu'il ne sert pas ou lorsque porté avec les vêtements Leyla, Sarah ou Patricia
- Peut être utilisée avec tout soutien-gorge ou bandage

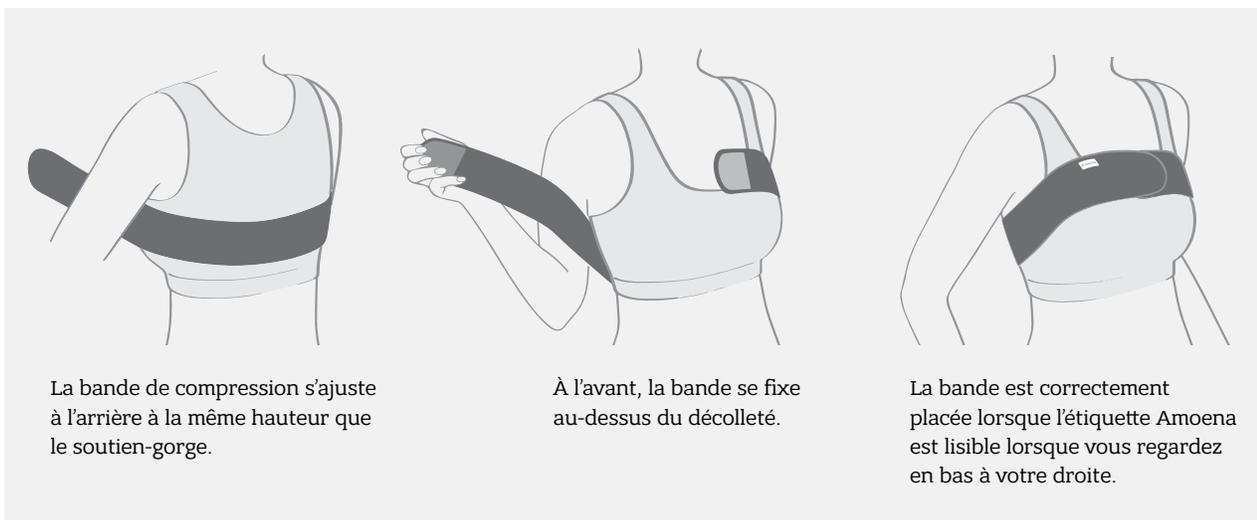

La bande de compression s'ajuste à l'arrière à la même hauteur que le soutien-gorge.

À l'avant, la bande se fixe au-dessus du décolleté.

La bande est correctement placée lorsque l'étiquette Amoena est lisible lorsque vous regardez en bas à votre droite.

Utilisation prévue des vêtements de compression

- Tous les types de chirurgie du sein (mastectomie, reconstruction, réduction et augmentation mammaires) et de la paroi thoracique
- Peut aider à comprimer uniformément la paroi thoracique et soutenir les tissus mammaires
- Aide à réduire les mouvements ou le déplacement des tissus et des implants
- Peut aider à protéger et à réduire l'irritation des tissus cicatriciels sensibles
- Peut aider à réduire le risque de lymphoedème
- Peut aider à réduire l'enflure, les hématomes et la douleur après la chirurgie

VÊTEMENTS POSTOPÉRATOIRES



HANAH SOUTIEN-GORGE POSTOPÉRATOIRE



Fermeture à glissière à l'avant, avec prise en charge des drains

Style 2160 Blanc

Tailles XS (26/28); S (28/30); M (32/34) L (36/38);
XL (38/40); 2XL (42/44); 3XL (46/48);
4XL (50/52)

Bonnets A/B; C/D

Agrafes 4 rangées : XS (A/B); S (A/B); M (A/B); XS (C/D)
5 rangées : L (A/B); XL (A/B); S (C/D); M (C/D)
6 rangées : 2X (A/B); 3X (A/B); 4X (A/B); L (C/D)
XL (C/D); 2XL (C/D); 3XL (C/D); 4XL (C/D)



Composition 82 % Coton, 18 % Spandex

- Tissu en coton doux offrant un confort apaisant pour la peau sensible
- Les sacs de drainage amovibles peuvent être attachés à la bande du bas. Vendus séparément, voir page 16
- Bonnets coupés et cousus avec pochettes en coton
- Bretelles élastiques qui s'attachent à l'avant pour un accès facile
- **Le kit 2160K** comprend le soutien-gorge 2160 plus deux prothèses postopératoires Fibrefill 2106 et deux sacs de drainage amovibles 2107



HANNAH CAMISOLE



Fermeture à glissière à l'avant, avec prise en charge des drains

Style 2860 Blanc

Tailles XS (2/4); S (6/8); M (10/12); L (14/16);
XL (18/20); 2XL (22/24); 3XL (26/28); 4XL (30)
Se réfère à la taille de vêtements

Bonnets A/B; C/D

Accessoires Comprend deux prothèses postopératoires Fibrefill
2106 et deux sacs de drainage amovibles 2107



Composition 82 % Coton, 18 % Spandex

- Un vêtement en coton confortable, avec une fermeture à glissière à l'avant qui offre un ajustement serré, sans être restrictif
- À l'intérieur, une bande maintient les sacs de drainage bien en place. Sacs de drainage vendus séparément, voir la page 16
- Les bretelles élastiques s'attachent à l'avant pour un accès facile lors des traitements et jusqu'à la récupération de l'amplitude des mouvements
- Les pochettes de coton maintiennent bien en place une prothèse Priform ou de loisir



MICHELLE CAMISOLE Avec prise en charge des drains



Style 2105 Blanc Noir Nu

Tailles XS (2/4); S (6/8); M (10/12); L (14/16);
XL (18/20); 2XL (22/24); 3XL (26/28); 4XL (30)
Refers to clothing size

Accessories Includes two 2106 Fiberfill Post-Surgical Forms
and two 2107 drain pouches

Composition 82 % Coton, 18 % Spandex



- Coton ultradoux, ce style offre un ajustement ferme mais non restrictif. Les coutures intérieures lisses favorisent un confort accru pour la peau sensible
- Col élastique facile à enfiler par les jambes
- À l'intérieur, une bande maintient les sacs de drainage bien en place. Sacs de drainage vendus séparément, voir la page 16
- Les pochettes de coton maintiennent bien en place une prothèse Priform ou de loisir

VÊTEMENTS POSTOPÉRATOIRES



ESTER SOUTIEN-GORGE POSTOPÉRAIRE ▲

Soutien-gorge postopératoire d'allure sportive avec fermeture à l'avant

Style 42576 Blanc

42577 Noir/Gris

Tailles 34-44 A, B, C, D; 36-42 DD

Agrafes 7 rangées : 34-38 A; 34-36 B; 34 C

8 rangées : 40-44 A; 38-42 B; 36-40 C; 34-38 D; 36 DD

10 rangées : 44 B; 42-44 C; 40-44 D; 38-42 DD

Composition 83 % Nylon, 13 % Spandex



- Coupe moderne et allure sportive; se porte aussi comme cami sport
- Tissus synthétiques laissant circuler l'air; mailles sur le côté et à l'arrière permettant une rapide évaporation de l'humidité
- Bonnets moulés et lisses, discrets sous les vêtements
- Tissus synthétiques laissant circuler l'air; mailles sur le côté et au dos aide à l'évacuation de l'humidité
- Bretelles larges, rembourrées et ajustables
- Les sacs de drainage amovibles peuvent être attachés à la sous-bande. Vendus séparément, p.16

Nouvelles
Couleurs



FRANCES BONNETS SOUPLES ▲ ☺ ⊕ () ♻️ 2,5

Style 2128 Blanc Nu

Rose Grise Dentelle

Noir Bleu/Blanc

Nouveau Rose/Taupe

Nouveau Gris/Blanc



Tailles XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42); XL (44/46); 2XL (48/50)

Bonnets Affaissé/Moyen
A/B; C/D; DD/DDD

Agrafes 4 rangées : XS (A/B, C/D); S (A/B); M (A/B)
5 rangées : XS (DD/DDD); S (C/D, DD/DDD);
M (C/D, DD/DDD); L (A/B, C/D);
XL (A/B, C/D); 2XL (A/B, C/D)

6 rangées : L (DD/DDD); XL (DD/DDD)

7 rangées : 2XL (DD/DDD)

Composition 90 % Coton, 10 % Spandex

- Soutien-gorge de loisirs à fermeture avant
- Tissu en coton ultra doux offrant un confort apaisant à la peau sensible
- Pour un meilleur support, nous vous recommandons de porter une prothèse Amoena Loisir avec ce soutien-gorge (voir p. 9)

CARACTÉRISTIQUES

▲
Pochettes
bilatérales

△
Sans
pochettes

♻️
Haute teneur
en coton

VÊTEMENTS POSTOPÉRATOIRES



THERAPORT



Vêtement pour traitements de radiothérapie à fermeture à l'avant

Style	2161	<input type="checkbox"/> Blanc
Tailles	S:	30-34 A, 30-32 B, 30 C
	M:	36-40 A, 34-38 B, 32-36 C, 30-34 D, 30-32 DD, 30 DDD;
	L:	42-46 A, 40-44 B, 38-42 C, 36-40 D, 34-38 DD, 32-36 DDD, 30-34 G, H;
	XL:	48-52 A, 46-50 B, 44-48 C, 42-46 D, 40-44 DD, 38-42 DDD, 36-40 G, 36-38 H;
	2XL:	54-58 A, 52-56 B, 50-54 C, 48-52 D, 46-50 DD, 44-48 DDD, 42-46 G, 40-44 H



Composition 81 % Coton, 12 % Nylon, 7 % Spandex

- Spécialement conçu pour porter immédiatement après tout type de chirurgie mammaire ou pendant les traitements de radiothérapie, incluant l'irradiation mammaire partielle (grains radioactifs et curiethérapie).
- Le tissu de coton sans couture comprend une fermeture Velcro® à l'avant et des bretelles Velcro® permettant un accès facile aux régions traitées sans devoir se dévêtir complètement
- Le tissu peut être coupé de chaque côté pour recevoir un cathéter
- La bande inférieure sans couture repose confortablement et s'ajuste délicatement autour des cathéters de curiethérapie et du site d'irradiation tout en maintenant fermement les sacs de drainage Amoena (vendus séparément)
- Les pochettes de coton maintiennent bien en place une prothèse Priform ou de loisir



PROTHÈSE POSTOPÉRATOIRE EN FIBRES DE REMBOURRAGE



Style	2106	<input type="checkbox"/> Blanc
Tailles	XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42); XL (44); 2XL (46); 3XL (48); 4XL (50); 5XL (52)	

Refers to bra band size

Composition 67 % Coton, 30 % Polyester, 3 % Spandex

- Offre une solution de symétrie ultra confortable, immédiatement après la chirurgie
- Facile à ajuster au volume désiré en ajoutant ou en enlevant des fibres de rembourrage. Des fibres de rembourrage supplémentaires sont comprises
- Une par paquet



SAC DE DRAINAGE AMOVIBLE



Style	2107	<input type="checkbox"/> Blanc
Tailles	Unique	

Composition 95 % Coton, 5 % Spandex

- S'attache au vêtement de façon sécuritaire grâce à la languette de VELCRO®
- Forme standard pour une utilisation avec les systèmes de drainage Jackson-Pratt®, Hemovac® ou autres
- Deux par paquet

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes bilatérales




Sans pochettes



Haute teneur en coton

FOULARDS

Nos foulards et chapeaux sont fabriqués de tissus hautement respirants, ce qui empêche l'accumulation de chaleur et prévient l'irritation de la peau. Un léger stretch dans le tissu assure également un ajustement stable et confortable, tandis que l'intérieur sans couture procure un confort incroyable, même lorsqu'il est porté toute la journée.

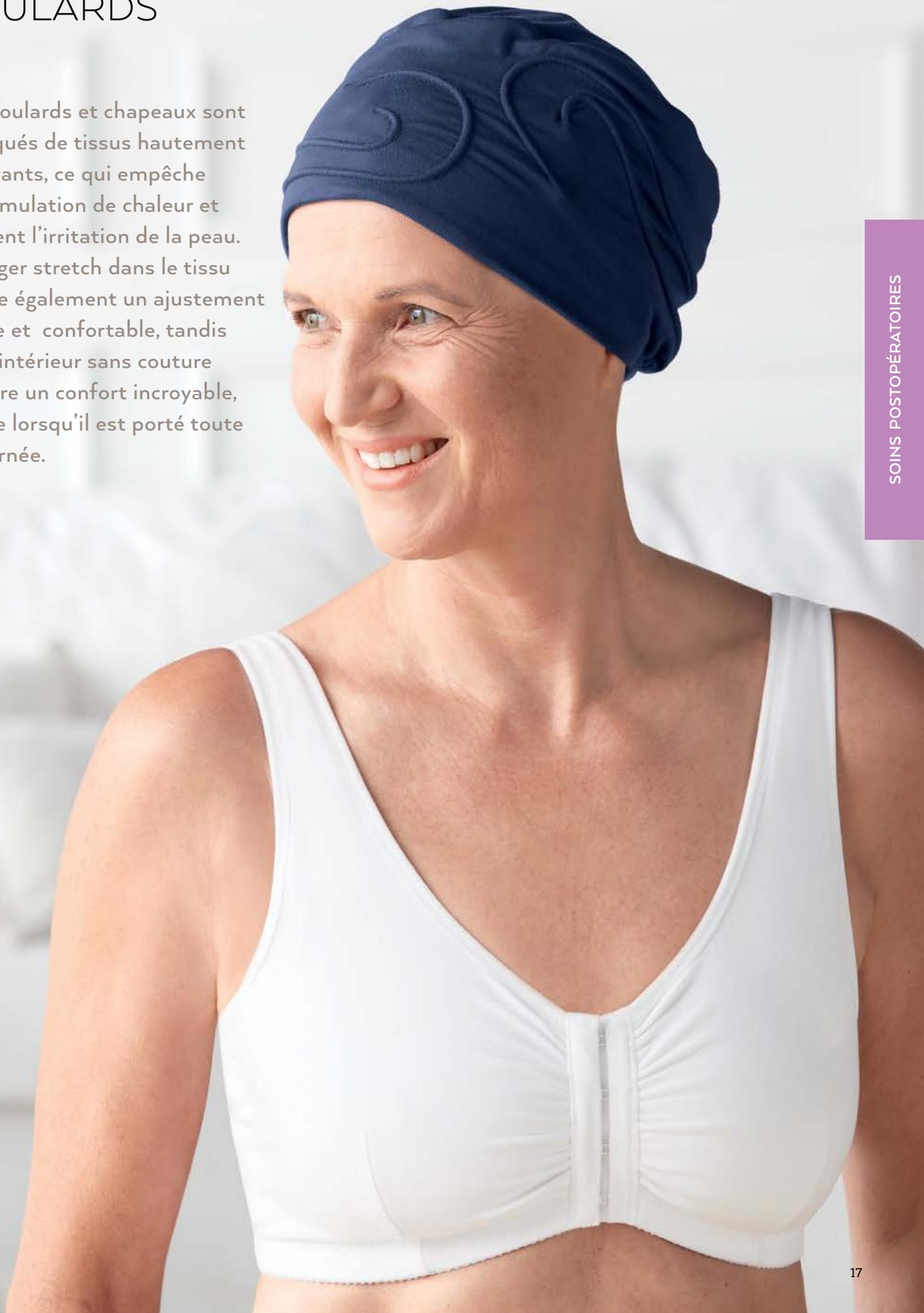



MOONFLOWER

Style 44711S  Marine

Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



MARIGOLD

Style 43813  Baie Rouge

43812  Noir

Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



TIGERLILY

Style 43482  Ivoire

43484  Gris Mélange

Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



WILLOW

Style 44712S  Bleu Mélange

Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



WATERLILY

Style 43821  Multicolore

Composition 100 % Coton



PRIMROSE*

Style 43246  Lavande/Multi

Composition 100 % Coton



BELLFLOWER*

Style 43524  Noir

Composition 100 % Tricot de Coton



CALLA

Style 43817  Bleu Denim

43818  Noir Denim

Composition
Extérieur : 100 % Denim Coton
Intérieur : 100 % Coton



DAPHNE

Style 44200S  Rouge/Blanc

44201S  Marine/Blanc

Composition Extérieur : 100 %
Intérieur : 100 % Coton

*Jusqu'à épuisement des stocks



BUTTERCUP

Style 43535  Bleu Mélange
43536  Marron
Mélange

Composition 95 % Viscose de Bambou
5 % Spandex



CLOVER

Style 43532  Ivoire
43533  Noir
43534  Prune Intense

Composition 95 %  TENCEL
5 % Spandex



DAYLILY

Style 44710S  Rouge Rubis
43486  Gris Mélange
43485  Sable
43811  Bleu Minuit
43810  Noir


Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex



BONNET DE BAINNADE

Style 70874  Marine
70873  Noir

Composition 80 % Nylon,
20 % Spandex

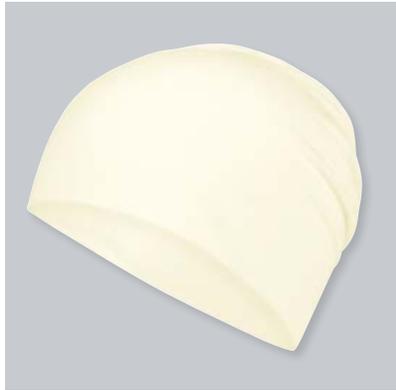

BONNET DE NUIT

Style 43525  Ivoire
43526  Noir

Composition 95 % Viscose de Bambou,
5 % Spandex

PROTHÈSES MAMMAIRES ET COMPLÉMENTS

RETROUVER SA SILHOUETTE

Vous trouverez dans les pages qui suivent une vaste gamme de prothèses et de compléments mammaires en silicone qui restaurent la symétrie après une chirurgie mammaire.

Des prothèses mammaires fabriquées à la main avec une technologie unique, qui sont confortables et qui procurent un look et une sensation naturels.

TECHNOLOGIE DE CONCEPTION

Nos prothèses et compléments mammaires, faits à la main, ont un aspect naturel, offrent une sensation authentique et offrent un ajustement sécuritaire. Nous nous assurons que tous les produits sont soigneusement testés par des femmes ayant subi une chirurgie mammaire. En tant qu'inventeur de la prothèse mammaire en silicone, nous avons des décennies d'expérience qui nous ont aidés à établir un processus de fabrication unique afin de produire les prothèses mammaires réalistes, les plus douces et de la plus haute qualité. Nos lignes directrices sont strictes, conformément aux normes DIN ISO 9001 et 13485 pour les dispositifs médicaux, garantissent la mise sur le marché d'un produit de la plus haute qualité. Tous les films et gels de silicone sont testés pour la compatibilité cutanée selon la norme DIN ISO 10993.



PROTHÈSES MAMMAIRES

Après une mastectomie, une prothèse mammaire permet une silhouette symétrique. Conçues pour s'insérer parfaitement dans notre lingerie à pochettes, elles sont confortables à porter et très naturelles.

COMPLÉMENTS MAMMAIRES

Les compléments mammaires Amoena sont la solution idéale pour les femmes qui souffrent d'asymétrie mammaire ou après une tumorectomie, une reconstruction mammaire ou de multiples biopsies.

CARACTÉRISTIQUES DES PROTHÈSES MAMMAIRES ET COMPLÉMENTS



Doux et naturel

Tous les produits Amoena sont fabriqués avec notre silicone douce et brevetée InTouch – la plus douce sur le marché – tout en respectant nos normes de qualité.

- Facile à ajuster
- Confortable douceur
- Sensation naturelle



Régulateur de température

Seules les prothèses mammaires Amoena renferment la technologie brevetée *Comfort+*, qui utilise un matériel thermorégulateur afin de maintenir une température corporelle idéale tout au long de la journée.

- S'ajuste avec la température du corps, même si celle-ci fluctue
- Absorbe, emmagasine et expulse la chaleur afin de réduire la transpiration derrière la prothèse

COSMETIC

Aspect et toucher naturels

Nous combinons ici notre silicone standard à notre silicone allégée pour une prothèse qui s'apparente le plus possible à un sein naturel.

- Douceur incroyable
- Drapé au look naturel
- Naturel au toucher et au regard
- Versatile lors de l'ajustement



S'ajuste à vous

Une pochette d'air novatrice qui permet d'ajuster la prothèse de façon personnalisée.

- Ajustement près du corps
- Le volume s'ajuste à chaque silhouette
- Une symétrie sur mesure

GAMMES DE PRODUITS AMOENA

Le Portfolio Amoena pour les Prothèses en Silicone comprend cinq gammes de produits différentes :

PROTHÈSES PREMIUM	Amoena Adapt	S'ajuste à chaque silhouette
	Amoena Contact	Une adhérence durable, conçue pour tous les mouvements
PROTHÈSES AVANCÉES	Amoena Energy	Caractéristiques novatrices pour un confort maximal
	Amoena Natura	Pour un look naturel
PROTHÈSE DE BASE	Amoena Essential	Un ajustement parfait

POIDS DES PROTHÈSES

Chaque gamme de produits propose différentes options de poids, représentées par la nuance de la couleur du segment. Plus la couleur est claire, plus la prothèse est légère par rapport à une prothèse mammaire régulière de même taille.

Xtra Light	Approximativement 40 % plus légère*
Light	Approximativement 25 % plus légère*
Allégé (Cosmetic)	Approximativement 20 % plus légère*
Régulier	Poids standard

*Comparativement à une prothèse mammaire régulière en silicone standard de même taille.


PROFIL DU BONNET

Les seins se différencient non seulement par leur taille de bonnet et leur taille de buste, mais aussi par leur forme. Afin d'obtenir l'ajustement le plus précis, Amoena propose trois profils de bonnets différents. Ces formes sont désignées par les chiffres 1 à 3 (correspondant à un profil de bonnet affaissé, moyen et fort) que l'on retrouve dans le nom d'une prothèse mammaire. Par exemple, la Amoena **Contact 2S** est la prothèse Amoena Contact avec un profil de bonnet moyen.

Vous pouvez comparer le sein restant après une chirurgie mammaire avec les images ci-dessous (alors que votre cliente porte un soutien-gorge bien ajusté – aide à identifier le profil de bonnet le mieux adapté.



Les femmes qui ont un petit tour de buste ont tendance à avoir un profil de bonnet Fort; les femmes qui ont un plus grand tour de buste ont tendance à avoir un profil de bonnet affaissé. La pochette du soutien-gorge doit s'harmoniser avec l'empreinte de la prothèse. Si la pochette du soutien-gorge est trop petite, la prothèse mammaire sera serrée et cela pourrait affecter sa durabilité.

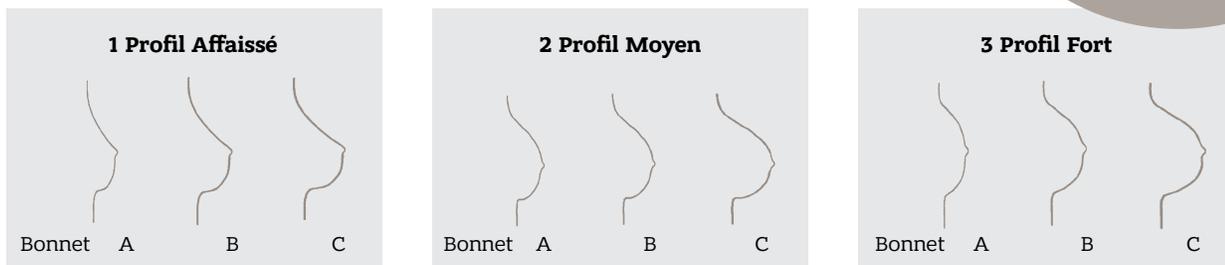

Les tailles A à C sont illustrées à titre d'exemples seulement

PROTHÈSES MAMMAIRES

Un portfolio rempli de choix pour l'ajustement le plus personnalisé qui soit

Avant de choisir une prothèse mammaire, ajustez la femme avec un soutien-gorge bien ajusté. Sélectionnez ensuite la prothèse mammaire appropriée avec les caractéristiques qui correspondent le mieux à ses besoins spécifiques. Tenez compte de son style de vie, de son niveau d'activité et de tout défi physique, comme une sensibilité de la peau, ses cicatrices ou de sa posture. Pour vous aider à trouver le bon soutien-gorge et la prothèse mammaire appropriée, veuillez consulter le tableau des prothèses mammaires à la fin de ce catalogue.

Profil du bonnet	1 Affaîssé		2 Moyen				3 Fort		
Forme	Symétrique 1S 1S ^N		Symétrique 2S 2S ^N		Asymétrique 2A	Extra Universel 2E 2U	Symétrique 3S	Asymétrique 3A	Extra 3E
PROTHÈSES PREMIUM	ADAPT <small>comfort+</small>	Adapt Air Xtra Light 1S ^N 328 Tailles 1-14		Adapt Air Xtra Light 2S ^N 326 Tailles 1-14					
		Adapt Air Light 1S ^N 329 Tailles 1-14		Adapt Air Light 2S ^N 327 Tailles 1-14				Adapt Light 3A 376 Tailles 4-12 G/D	
PROTHÈSES PREMIUM	CONTACT <small>comfort+</small>			Contact Light 2S 380C Tailles 1-14				Contact Light 3S 385C Tailles 0-10	
		Contact 1S 384C Tailles 1-14		Contact 2S 381C Tailles 1-12		Contact 2A 383C Tailles 0-12 G/D		Contact 3S 382C Tailles 0-10 Foncé 1-10	
PROTHÈSES AVANÇÉES	ENERGY <small>comfort+</small>			Energy Light 2S 342S Tailles 1-14 Foncé 1-14			Energy Light 2U 341S Tailles 1-14		
		Energy 1S 349S Tailles 1-12		Energy Cosmetic 2S 310 Tailles 1-14			Energy 2U 347S Tailles 1-14		Energy Cosmetic 2S 311 Tailles 1-12
	NATURA <small>comfort+</small>	Natura Xtra Light 1S ^N 401 Tailles 1-14		Natura Xtra Light 2S ^N 400 Tailles 1-17 Foncé 1-17					
		Natura Light 1S ^N 402 Tailles 1-14		Natura Light 2S 390 Tailles 1-17 Foncé 1-15		Natura Light 2A 392 Tailles 0-14 G/D		Natura Light 2U 399 Tailles 1-14	Natura Light 3S 391 Tailles 0-12
PROTHÈSES AVANÇÉES	NATURA <small>comfort+</small>	Natura Light 1S 664 Tailles 1-14		Natura Cosmetic 2S ^N 323 Tailles 1-14				Natura Cosmetic 3S 321 Tailles-12	
				Natura Cosmetic 2S 320 Tailles 1-14				Natura Cosmetic 3E 322 Tailles 1-14 G/D	
		Natura 1S 396 Tailles 1-14					Natura 2U 394 Tailles 1-14		Natura 3E 397 Tailles 1-14 G/D
DE BASE	ESSENTIAL	Essential Light 1S ^N 314 Tailles 1-14 Foncé 1-14		Essential Light 2S 442 Tailles 1-17 Foncé 1-17		Essential Light 2A 356 Tailles 0-14 G/D			
		Essential 1S 630 Tailles 1-12				Essential 2A 353 Tailles 0-12 G/D		Essential 2E 474 Tailles 0-12 Foncé 0-12	
								Essential Light 3E 556 Tailles 1-14 G/D Foncé 4-14 G/D	

PROTHÈSES MAMMAIRES
ET COMPLÉMENTS

AMOENA ADAPT & ADAPT AIR

S'ajuste à chaque silhouette

**Nouveau
Adapt Air!**
Ajustement sur
mesure avec notre
pochette d'air
ajustable*



CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES


- **S'ajuste à chacune**
La pochette d'air intégrée de l'Adapt Air permet un ajustement sur mesure, simplement en ajoutant ou en libérant de l'air avec la pompe incluse
- **Ajustement sur mesure**
Son volume est ajustable et personnalisable, ce qui fait que la prothèse Adapt Air épouse la forme du corps et du soutien-gorge – pour une silhouette symétrique 360 – en regardant vers le bas ou dans le miroir
- **Ajustement près du corps**
La prothèse épouse confortablement les contours de chaque poitrine pour un ajustement sur mesure, près du corps
- **Confortable toute la journée**
La technologie thermorégulatrice brevetée *Comfort+* offre un confort qui dure toute la journée et maintient une température corporelle idéale
- **Plus légère**
La silicone légère InTouch et la pochette d'air rendent certaines prothèses jusqu'à 40 % plus légères**, selon le style

*Brevet en attente

**Comparativement à une prothèse régulière en silicone standard de même taille

S'AJUSTE À ELLE

Les prothèses Adapt et Adapt Air sont conçues pour épouser le corps pour un ajustement sur mesure.

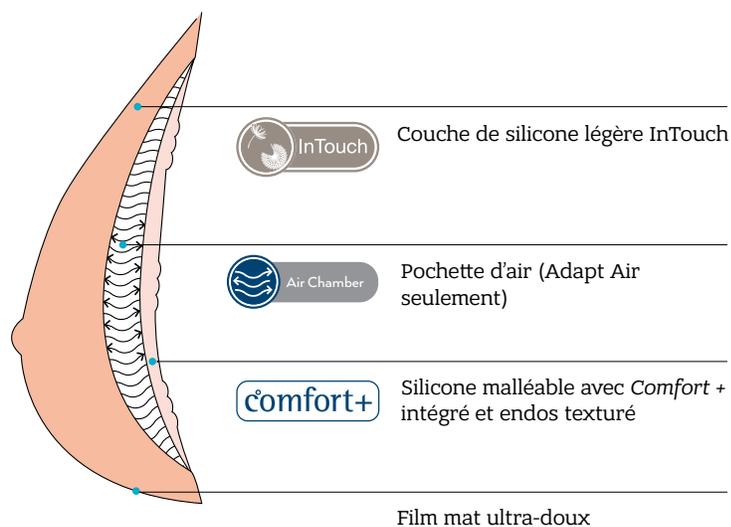

Adapt Air Xtra Light 1S^N 328*

Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Poids	Xtra Léger
Couches	3 Couches
Tailles	1-14



Adapt Air Xtra Light 2S^N 326*

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Xtra Léger
Couches	3 Couches
Tailles	1-14



Adapt Air Light 1S^N 329*

Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Poids	Léger
Couches	3 Couches
Tailles	1-14



Adapt Air Light 2S^N 327*

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Léger
Couches	3 Couches
Tailles	1-14



Adapt Light 3A 376**

Profil de Bonnets	Fort
Forme	Asymétrique
Poids	Léger
Couches	2 Couches
Tailles	4-12 G/D




Pompe O70

Aussi vendu séparément


*Les prothèses mammaires légères ont une couleur plus claire. **Ne renferme pas de poche d'air.

COMMENT UTILISER ADAPT AIR


Du point de vue de vos clientes

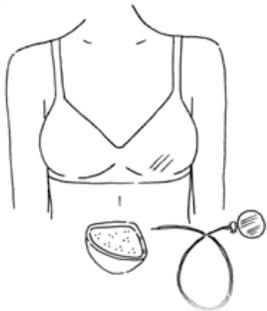

1 Placez la prothèse mammaire et la pompe séparément, devant vous.

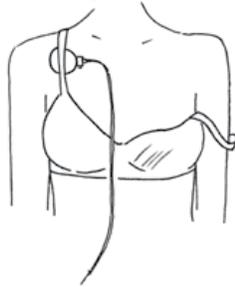


2 Placez la pompe sous la bretelle du soutien-gorge située du côté opposé, afin que vos deux mains demeurent libres. Faire glisser la bretelle du soutien-gorge située du côté de la prothèse.

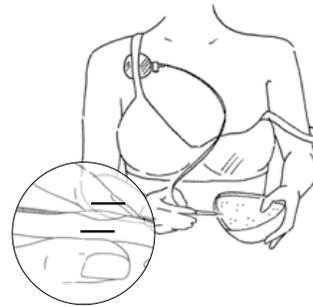


3 Connectez la pompe en insérant la canule (tube) dans la valve d'ouverture située sur le côté de la prothèse mammaire. Ouvrir la valve en la serrant légèrement entre le pouce et l'index. Assurez-vous que la canule est **bien insérée** dans la valve.




4 Une fois la canule solidement raccordée à la prothèse, insérez la prothèse mammaire dans le bonnet du soutien-gorge.

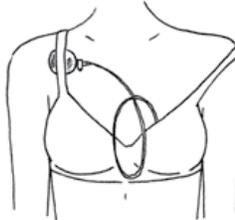

5 Repositionnez correctement la bretelle.

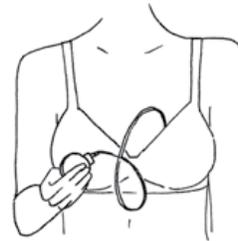

6 Ajustez le volume de la prothèse en pompant la poire de la pompe. Pour évacuer de l'air, appuyez sur le bouton noir du drain et appuyez doucement sur la prothèse mammaire; ajuster selon le besoin.

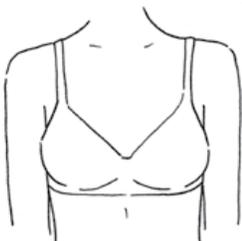

7 Une fois l'ajustement terminé, retirez soigneusement la canule de la valve. L'air restera dans la prothèse.



8 La prothèse est maintenant ajustée sur mesure. Sortez la prothèse du bonnet et insérez-la dans la pochette du soutien-gorge.

Une fois le volume désiré, l'air reste enfermé dans la prothèse jusqu'à ce que vous décidiez d'ajouter ou retirer de l'air au besoin.

AMOENA CONTACT

Une adhérence durable, conçue pour tous les mouvements

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- Adhère directement à la peau et bouge avec le corps. Reste bien en place lors de chaque mouvement.
- Soulage la pression au niveau des épaules – idéal pour les femmes souffrant de lymphoedème ou ayant une forte poitrine.
- Facile à porter et à entretenir; un entretien quotidien est essentiel pour une adhérence durable
- Offre plus de liberté dans le choix des vêtements, tels que des décolletées
- Reconnu pour offrir aux femmes un plus grand sentiment de sécurité et de confiance en elle



Regardez bien la cliente, surtout de côté, pour vous assurer que la prothèse est de la bonne taille et de la bonne forme.



Emballé avec un échantillon de produit Amoena pour l'entretien de votre prothèse et une brosse douce. La durée de l'adhésion varie pour chaque femme et dépend de l'entretien. Des nettoyages approfondis et réguliers sont essentiels. Voir p. 42 pour le produit nettoyant pour prothèses Amoena.

GAMME AMOENA CONTACT



comfort+

Contact Light 2S 380C*

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Léger
Couches	3 Couches
Tailles	1-14



comfort+

Contact Light 3S 385C*


Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Poids	Léger
Couches	3 Couches
Tailles	0-10



comfort+

Contact 1S 384C


Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Poids	Régulier
Couches	3 Couches
Tailles	1-14

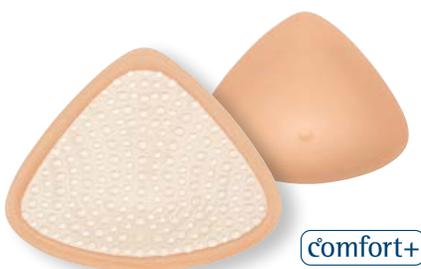

comfort+

Contact 2S 381C

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Régulier
Couches	3 Couches
Tailles	1-12

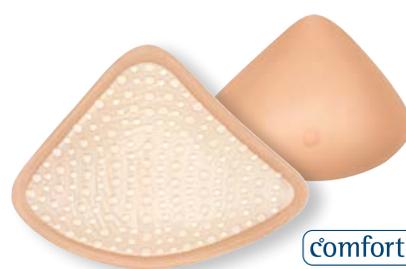

comfort+

Contact 2A 383C

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Asymétrique
Poids	Régulier
Couches	3 Couches
Tailles	0-12 G/D



comfort+

Contact 3S 382C

Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Poids	Régulier
Couches	3 Couches
Tailles	0-10
Tailles Foncés	1-10



comfort+

Contact 3E 386C

Profil de Bonnets	Fort
Forme	Extra
Poids	Régulier
Couches	3 Couches
Tailles	1-14 G/D



*Les prothèses mammaires légères ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé

COMMENT UTILISER AMOENA CONTACT

Du point de vue de vos clientes

APPLICATION DE LA PROTHÈSE AMOENA CONTACT

La paroi thoracique doit être parfaitement nettoyée à l'aide de lingettes nettoyantes toniques Amoena pour la préparation de la peau. Ensuite, assurez-vous que la zone est parfaitement sèche. Plus la peau est propre et sèche, mieux la prothèse mammaire adhèrera. Veuillez ne pas toucher la surface adhésive de la prothèse, car cela pourrait nuire à son adhérence.

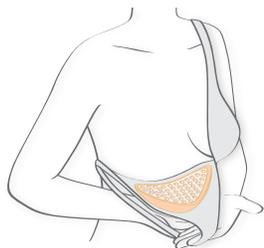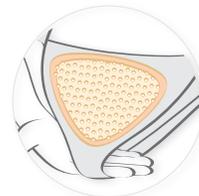


1 Faites glisser votre bretelle de soutien-gorge par-dessus votre épaule et passez-y votre bras. Penchez-vous vers l'avant

2 En utilisant votre main du côté non opéré, saisissez la bretelle et éloignez le bonnet de votre corps.

3 Prenez la prothèse de l'autre main et tout en étant penchée vers l'avant, placez-la dans le bonnet de votre soutien-gorge. Assurez-vous que la prothèse est parfaitement positionnée dans le bonnet.

4 Le côté le plus effilé de la prothèse doit être placé vers le haut du bonnet, où s'attache la bretelle.

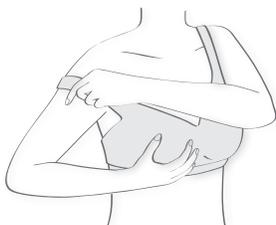

5 Placez votre main libre à l'extérieur du bonnet. Relevez-vous lentement en appuyant soigneusement la prothèse en place contre votre corps.

6 Tirez la bretelle du soutien-gorge par-dessus votre épaule et appuyez à nouveau sur la prothèse pour vous assurer qu'elle est solidement fixée.

7 Vérifiez l'ajustement. Si la position de la prothèse doit être ajustée, il suffit de la retirer et de la repositionner.

RETRAIT DE LA PROTHÈSE AMOENA CONTACT



1 Saisissez la prothèse avec une main et penchez-vous vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez le poids de la prothèse dans votre main.

2 À partir du point le plus éloigné de la zone de la cicatrice, tirez délicatement sur la prothèse.

3 Si la surface adhésive de la prothèse Amoena Contact se colle accidentellement sur elle-même lors du retrait, elle peut être séparée en la tenant sous l'eau courante.



Note : Le bout des doigts doit être placé aussi près que possible du bord de la prothèse, et non directement sur la couche adhésive arrière. Veuillez faire preuve de prudence si vous avez de longs ongles. Ils peuvent endommager la pellicule externe.

NETTOYAGE DE LA PROTHÈSE AMOENA CONTACT




1 Déposez trois gouttes du nettoyant Soft Cleanser sur la surface adhésive sèche puis mouillez la brosse spéciale avec de l'eau tiède.



2 Frottez fermement la surface adhésive avec la brosse pendant environ trois minutes, en effectuant des mouvements circulaires.



3 Rincez abondamment à l'eau tiède.

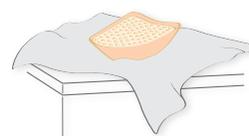

4 Laissez sécher à l'air.

AMOENA ENERGY

Caractéristiques novatrices pour un confort optimal

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- Une surface perlée tridimensionnelle unique en son genre au dos de la prothèse permet à l'air de circuler librement derrière la prothèse, pour une meilleure ventilation et évacuation de l'humidité
- Le matériel *Comfort+* intégré à la silicone réduit encore plus la transpiration en uniformisant la température derrière la prothèse
- Idéal si elle transpire beaucoup, en raison de l'activité physique, d'un traitement médical ou de la ménopause



PROTHÈSES MAMMAIRES
ET COMPLÉMENTS

Avis
d'une PRO



Une fois le soutien-gorge et la prothèse mammaire bien ajustés, c'est une bonne idée d'encourager votre cliente à se regarder et à apprécier sa nouvelle silhouette en se regardant dans un miroir et non en penchant la tête vers le bas. Les gens la regarderont de face et non pas d'en haut.

À PROPOS D'AMOENA ENERGY

Unique en son genre

Les prothèses Amoena Energy ont 30 % plus de *Comfort+*, notre matériau thermorégulateur breveté (à l'exception des prothèses Cosmetic). *Comfort+* réduit la transpiration derrière la prothèse. Les bénéfices du *Comfort+* combinés à la couche arrière tridimensionnelle qui permet une circulation d'air optimale pour pouvoir évacuer l'humidité lui procurent un confort ultime tout au long de la journée.

Après 30 minutes de chaleur contrôlée, la température est régularisée seulement pas la prothèse Energy

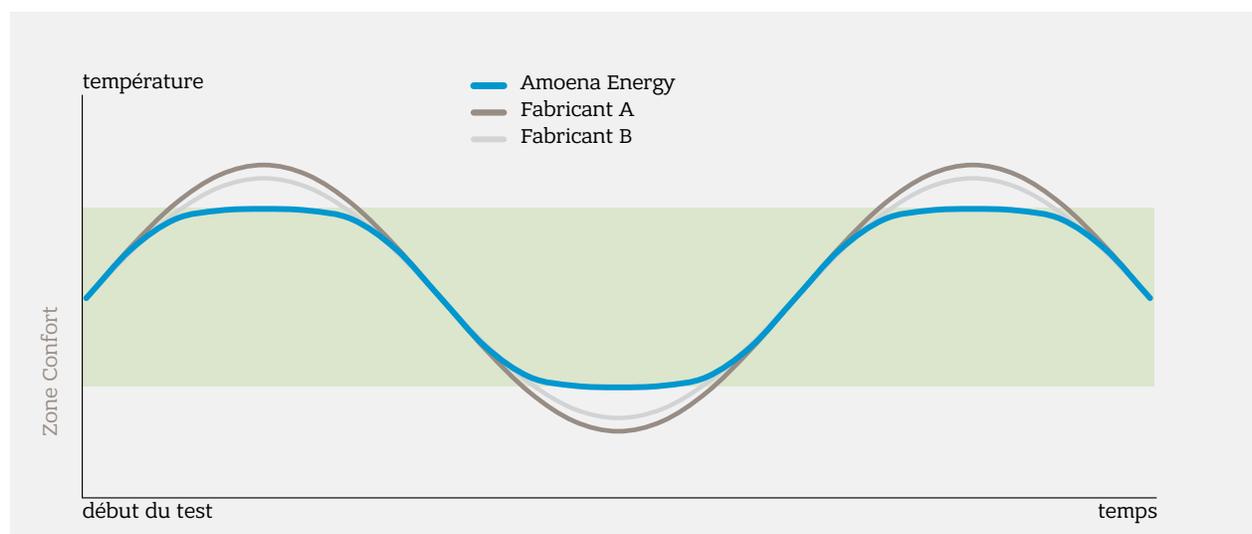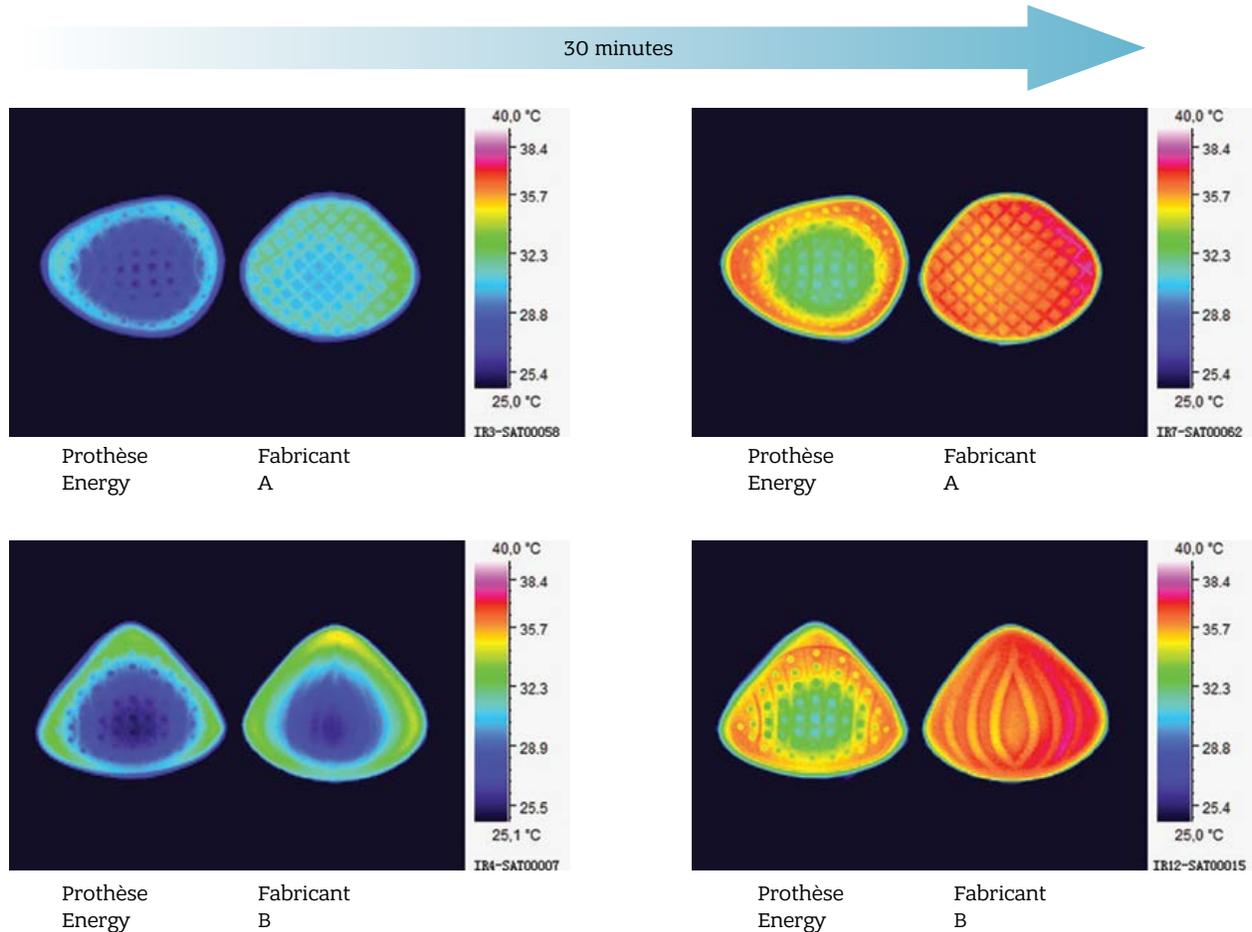

GAMME AMOENA ENERGY



comfort+

Energy Light 2S 342S*


Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Léger
Couches	3 Couches
Tailles	1-14
Tailles Foncés	1-14



comfort+

Energy Light 2U 341S*

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Universel
Poids	Léger
Couches	3 Couches
Tailles	1-14

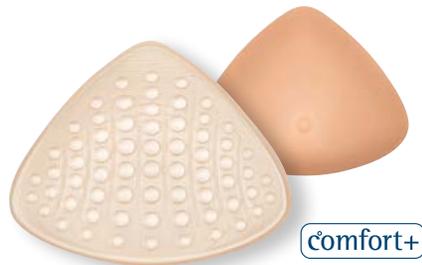

comfort+

Energy Cosmetic 2S 310

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Allégé
Couches	3 Couches
Tailles	1-14



comfort+

Energy Cosmetic 3S 311


Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Poids	Allégé
Couches	3 Couches
Tailles	1-12



comfort+

Energy 1S 349S

Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Poids	Régulier
Couches	3 Couches
Tailles	1-12

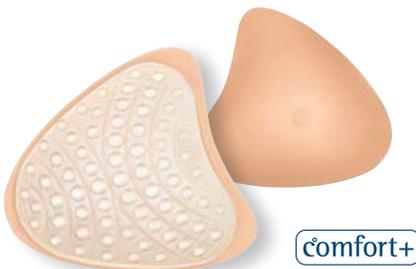

comfort+

Energy 2U 347S

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Universel
Poids	Régulier
Couches	3 Couches
Tailles	1-14

*Les prothèses mammaires légères ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé

AMOENA NATURA

Apparence et mouvement naturels — comme aucune autre prothèse

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- Conçue pour offrir la sensation d'un sein naturel en bougeant avec le corps et en s'aplatissant lorsqu'elle se couche sur le dos
- Certains styles comportent une couche souple et transparente de silicone à l'arrière qui moule le corps, tout en étant d'une douceur incroyable sur les zones sensibles ou les cicatrices
- Le matériel breveté *Comfort+* intégré à la silicone réduit encore plus la transpiration en uniformisant la température derrière la prothèse



Avis
d'une PRO

Si vous êtes confiante, vos clientes le constateront. Vous risquez d'avoir à répondre à beaucoup moins de questions en rapport avec l'ajustement ou les produits. Lorsque le premier soutien-gorge que vous suggérez lui va... le tour est joué. Ayez confiance en vous.

AMOENA NATURA XTRA LIGHT 1S^N ET 2S^N



PROTHÈSES MAMMAIRES
ET COMPLÈMENTS

Lorsque votre cliente désire une prothèse encore plus légère qu'une prothèse allégée, il est temps de lui parler de Natura Xtra Light.

- Un poids presque 40 % plus léger qu'une prothèse en silicone de forme et de taille similaires, dû à une toute nouvelle formulation de la silicone
- La durabilité Amoena est toujours maintenue – la couche de silicone légèrement plus ferme au dos de la prothèse aide à stabiliser celle-ci lorsqu'elle est portée dans la pochette d'un soutien-gorge, assurant par le fait même la durabilité de la prothèse
- Renferme du *Comfort+*, un matériel breveté et intégré dans la couche arrière, afin de régulariser les fluctuations de température et la transpiration derrière la prothèse

Natura Xtra Light est parfaite pour les femmes souffrant de lymphoedème ou d'ostéoporose; les femmes touchées par ces deux pathologies peuvent grandement bénéficier d'une prothèse mammaire plus légère.

Notre silicone Xtra Light est aussi disponible dans les nouvelles prothèses Adapt Air. Voir p. 24

DEUX NOUVELLES FORMES POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

La prothèse Natura Xtra Light est offerte dans nos 2 formes les plus modernes, la 1S^N (pour un profil de bonnet affaissé) et la 2S^N (pour un profil de bonnet moyen). Nos clientes ont exprimé le souhait d'avoir un contour plus arrondi pour un ajustement plus confortable. Les nouvelles formes répondent à ce besoin; symétriques, elles peuvent être portées de chaque côté, procurant les avantages suivants :

- Un volume plus arrondi de la section inférieure, de sorte que la prothèse mammaire tombe et s'ajuste plus naturellement que toute autre prothèse mammaire allégée
- Un ajustement plus près du corps et une empreinte plus étroite que la 2S, pour éviter le chevauchement sur le sein naturel ou sur la prothèse de l'autre côté
- Un dos légèrement courbé, pourvu de petits canaux qui permet à la prothèse de s'ajuster au corps plus facilement et de rester bien en place dans une pochette de soutien-gorge



GAMME AMOENA NATURA



Natura Xtra Light 1S^N 401*

Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Poids	Xtra Léger
Couches	2 Couches
Tailles	1-14



Natura Xtra Light 2S^N 400*

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Xtra Léger
Couches	2 Couches
Tailles	1-17
Tailles Foncés	1-17



Natura Light 1S^N 402*

Profil de Bonnets	Affaissé	GEL Arrière
Forme	Symétrique	
Poids	Léger	
Couches	3 Couches	
Tailles	1-14	



Natura Light 1S 664*

Profil de Bonnets	Affaissé	GEL Arrière
Forme	Symétrique	
Poids	Léger	
Couches	3 Couches	
Tailles	1-14	



Natura Light 2S 390*

Profil de Bonnets	Moyen	GEL Arrière
Forme	Symétrique	
Poids	Léger	
Couches	3 Couches	
Tailles	1-17	
Tailles Foncés	1-15	



Natura Light 2A 392*

Profil de Bonnets	Moyen	GEL Arrière
Forme	Asymétrique	
Poids	Léger	
Couches	3 Couches	
Tailles	0-14 G/D	



Natura Light 2U 399*

Profil de Bonnets	Moyen	GEL Arrière
Forme	Universel	
Poids	Léger	
Couches	3 Couches	
Tailles	1-14	



Natura Light 3S 391*

Profil de Bonnets	Fort	GEL Arrière
Forme	Symétrique	
Poids	Léger	
Couches	3 Couches	
Tailles	0-12	



Natura Light 3A 373N*

Profil de Bonnets	Fort	GEL Arrière
Forme	Asymétrique	
Poids	Léger	
Couches	3 Couches	
Tailles	4-12 G/D	
Tailles Foncés	4-12 G/D	

*Les prothèses mammaires légères ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé

GAMME AMOENA NATURA



comfort+

Natura Cosmetic 2S^N 323 GEL Arrière

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Allégé
Couches	3 Couches
Tailles	1-14



comfort+

Natura Cosmetic 2S 320 GEL Arrière

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Allégé
Couches	3 Couches
Tailles	1-14



Natura Cosmetic 3S 321

Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Poids	Allégé
Couches	3 Couches
Tailles	1-12



comfort+

Natura Cosmetic 3E 322 GEL Arrière

Profil de Bonnets	Fort
Forme	Extra
Poids	Allégé
Couches	3 Couches
Tailles	1-14 G/D



comfort+

Natura 1S 396


Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Poids	Régulier
Couches	2 Couches
Tailles	1-14



comfort+

Natura 2U 394 GEL Arrière

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Universel
Poids	Régulier
Couches	3 Couches
Tailles	1-14

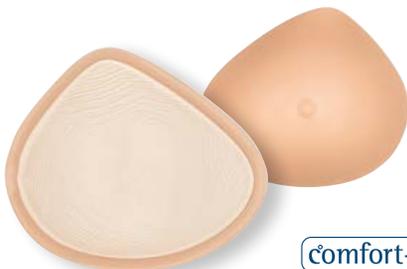

comfort+

Natura 3E 397

Profil de Bonnets	Fort
Forme	Extra
Poids	Régulier
Couches	2 Couches
Tailles	1-14 G/D

AMOENA ESSENTIAL

Ajustement équilibré et sûr

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- Procure une apparence symétrique, confortable et naturelle

Avis
d'une PRO

Il est préférable de ne pas dévoiler à votre cliente quelle taille de soutien-gorge vous avez choisi avant qu'elle ne trouve un look qui lui convient. Parfois, connaître à l'avance la taille peut occasionner des pensées négatives, même lorsque le soutien-gorge lui va à merveille.

GAMME AMOENA ESSENTIAL



Essential Light 1S^N 314*

Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Poids	Léger
Couches	1 couche
Tailles	1-14
Tailles Foncés	1-14



Essential Light 2S 442*

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Symétrique
Poids	Léger
Couches	1 couche
Tailles	1-17
Tailles Foncés	1-17



Essential Light 2A 356*

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Asymétrique
Poids	Léger
Couches	1 couche
Tailles	0-14 G/D



Essential Light 3E 556*

Profil de Bonnets	Fort
Forme	Extra
Poids	Léger
Couches	1 couche
Tailles	1-14 G/D
Tailles Foncés	4-14 G/D



Essential 1S 630

Profil de Bonnets	Affaissé
Forme	Symétrique
Poids	Régulier
Couches	1 couche
Tailles	1-12



Essential 2A 353

Profil de Bonnets	Moyen
Forme	Asymétrique
Poids	Régulier
Couches	1 couche
Tailles	0-12 G/D



Essential 2E 474

Profil de Bonnets	Extra
Forme	Symétrique
Poids	Régulier
Couches	1 couche
Tailles	0-12
Tailles Foncés	0-12



Essential 3S 363

Profil de Bonnets	Fort
Forme	Symétrique
Poids	Régulier
Couches	1 couche
Tailles	0-12

*Les prothèses mammaires légères ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé

COMPLÉMENTS MAMMAIRES BALANCE



Les compléments Amoena Balance sont une solution non-chirurgicale qui s'offre aux femmes ayant une asymétrie au niveau de la poitrine, ou suite à une reconstruction, une tumorectomie ou de multiples biopsies.

- Notre nouveau portfolio offre plus de formes, de styles et d'épaisseurs
- La plupart des styles offrent une couche intégrée de *Comfort+* au dos afin de réduire la chaleur qui s'accumule derrière la prothèse
- Le complément remplit le bonnet du soutien-gorge là où il y a un manque de volume ou la poitrine est inégale
- Pourvu de bords amincis, qui assurent une transition parfaite sur le corps
- La méthode de Mesure Croisée du Bonnet (MCB) a été développée pour vous aider à trouver la meilleure épaisseur OVAL et DELTA pour ses besoins. Vous trouverez le tableau à la p. 82

BALANCE PORTFOLIO

Épaisseur	Mince		Moyen	Volume	Spécial	
Mesure MCB	< 1 cm ou 3/8 po		1 à 2 cm ou 3/8 à 3/4 po	> 2 cm ou 3/4 po		
FORME	Oval 	Delta 	Delta 	Delta 	Ellipse 	Varia 
BALANCE CONTACT <i>comfort+</i>			Balance Contact MD 229 Tailles 2-12	Balance Contact VD 230 Tailles 3/4-9/10		Balance Contact SV 286 Tailles S-XL
BALANCE NATURA <i>comfort+</i>				Balance Natura Light VD 221 Tailles 3/4-11/12		
	Balance Natura TO 227 Tailles S-XL	Balance Natura TD 217 Tailles 1-10	Balance Natura MD 220 Tailles 2-12	Balance Natura VD 222 Tailles 3/4-9/10	Balance Natura SE 231 Tailles S-XL	Balance Natura SV 285 Tailles S-XL
BALANCE ESSENTIAL				Balance Essential Light VD 224 Tailles 3/4-11/12 Foncé 5/6-11/12		
	Balance Essential TO 228 Tailles S-XL	Balance Essential TD 218 Tailles 1-10	Balance Essential MD 223 Tailles 3-12 Foncé 4-10	Balance Essential VD 225 Tailles 3/4-9/10	Balance Essential SE 232 Tailles S-XL	

QUATRE FORMES QUI OFFRENT PLUSIEURS OPTIONS

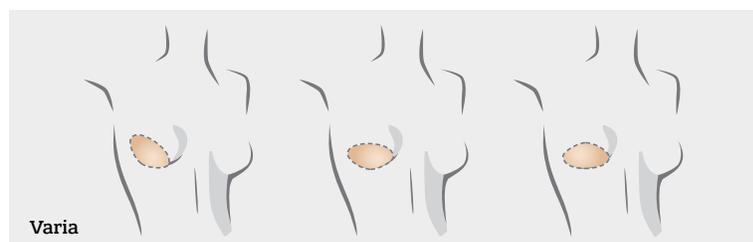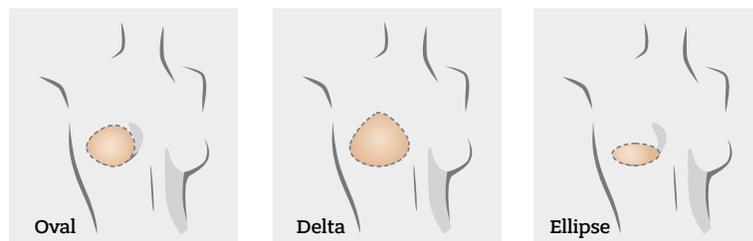

Le type de chirurgie, l'emplacement ou la quantité de tissus retirés varient d'une femme à l'autre. Les compléments Amoena Balance existent en plusieurs formes, tailles et épaisseurs – elles peuvent être appliquées dans tous les sens là où le besoin est – afin de vous aider à trouver la solution idéale pour votre cliente.

GAMME DE COMPLÉMENTS MAMMAIRES BALANCE



comfort+

Balance Contact MD 229

Épaisseur Medium
Forme Delta
Couches 2 Couches
Tailles 2-12



comfort+

Balance Contact VD 230

Épaisseur Volume
Forme Delta
Couches 2 Couches
Tailles 3/4-9/10



comfort+

Balance Contact SV 286

Épaisseur Spécial
Forme Varia
Couches 2 Couches
Tailles S-XL



comfort+

Balance Natura Light VD 221*

Épaisseur Volume
Forme Delta
Couches 2 Couches
Tailles 3/4-11/12



comfort+

Balance Natura TO 227

Épaisseur Mince
Forme Oval
Couches 2 Couches
Tailles S-XL



comfort+

Balance Natura TD 217

Épaisseur Mince
Forme Delta
Couches 2 Couches
Tailles 1-10



comfort+

Balance Natura MD 220

Épaisseur Medium
Forme Delta
Couches 2 Couches
Tailles 2-12



comfort+

Balance Natura VD 222

Épaisseur Volume
Forme Delta
Couches 2 Couches
Tailles 3/4-9/10



comfort+

Balance Natura SE 231

Épaisseur Spécial
Forme Ellipse
Couches 2 Couches
Tailles S-XL



comfort+

Balance Natura SV 285

Épaisseur Spécial
Forme Varia
Couches 2 Couches
Tailles S-XL

*Les prothèses mammaires légères ont une couleur plus claire.

GAMME DE COMPLÉMENTS MAMMAIRES BALANCE



Balance Essential Light VD 224* ●

Épaisseur	Volume
Forme	Delta
Couches	1 couche
Tailles	3/4-11/12
Tailles Foncés	5/6-11/12



Balance Essential TO 228

Épaisseur	Mince
Forme	Oval
Couches	1 couche
Tailles	S-XL



Balance Essential TD 218

Épaisseur	Mince
Forme	Delta
Couches	1 couche
Tailles	1-10



Balance Essential MD 223 ●

Épaisseur	Medium
Forme	Delta
Couches	1 couche
Tailles	3-12
Tailles Foncés	4-10



Balance Essential VD 225

Épaisseur	Volume
Forme	Delta
Couches	1 couche
Tailles	3/4-9/10



Balance Essential SE 232

Épaisseur	Spécial
Forme	Ellipse
Couches	1 couche
Tailles	S-XL

*Les prothèses mammaires légères ont une couleur plus claire. ● Disponible en Foncé

PROTHÈSES MAMMAIRES
ET COMPLÉMENTS

TROUSSE D'AJUSTEMENT BALANCE



TROUSSE D'AJUSTEMENT PREMIUM KIT 245

17 compléments partiels de différentes tailles, et un tableau des tailles pour vous aider à trouver le bon ajustement

AUTRES PROTHÈSES MAMMAIRES



PROTHÈSE DE BAINNADE AQUA WAVE

Style 149
Tailles 1-14

- Prothèse en silicone transparente, à la forme unique, pour vos activités aquatiques
- Cette prothèse symétrique présente des ondulations à l'arrière pour permettre à l'air et à l'eau de circuler, afin de prévenir l'effet de succion
- Offre un profil de bonnet affaissé ou moyen
- Livrée dans un sac à cordon mode et étanche, assez grand pour contenir un maillot de bain humide



Sac de Baignade Aqua Wave aussi vendu séparément, style #049



PROTHÈSE DE LOISIR EN MOUSSE CALIBRÉE

Style 132N
Tailles 3-14

Composition
Mousse calibrée : 30 % Polyuréthane,
70 % Barium Sulfate (7727-43-7)
Couverture : 82 % Nylon, 18 % Spandex



- La mousse de polyuréthane est légèrement lestée avec du sulfate de baryum (7727-43-7), un minéral naturel sous forme de poudre
- Le revêtement en tissu ultradoux amovible et lavable aide à maintenir un environnement propre
- Prothèse idéale pour dormir

Une forme postopératoire ne remplace pas une prothèse mammaire en silicone, qui elle, est conçue pour un usage quotidien à long terme et qui procure à votre corps l'équilibre approprié

ENTRETIEN DES PROTHÈSES

AMOENA NETTOYANT DOUX ET BROSSSE SOUPLE

Le nettoyant doux Amoena est spécialement formulé pour la surface adhésive des prothèses Contact et ne contient aucune substance à base d'huile. Il est aussi parfait pour le nettoyage des prothèses mammaires non adhésives. Pour une meilleure adhésion, utilisez le nettoyant doux Amoena avec la brosse douce Amoena. Le nettoyant doux est également recommandé pour l'entretien des produits Contact Balance et des mamelons adhésifs.

Style# 08703
Tailles 150 ml

La brosse est développée spécifiquement pour les prothèses Amoena Contact et elle présente des poils ronds et soyeux qui n'endommagent pas la surface adhésive.

Style# 08903 / 1 pièce

SANS
ALUMINIUM



ACCESSOIRES POUR PROTHÈSES MAMMAIRES




MAMELONS ADHÉSIFS

- Adhèrent solidement à une prothèse ou à un complément mammaire, ou sur le sein naturel ou reconstruit, grâce à un adhésif en silicone
- Livrés avec une bouteille de 30 ml de nettoyant Amoena Soft Cleanser
- La trousse de démonstration présente un article de chaque couleur dans chaque taille, afin de déterminer la taille et la couleur appropriée (pour les détaillants seulement)

Style 136 Ivoire
137 Amande (illustré)
138 Bronze
139 Foncé
134 Trousse de démonstration

Tailles Petit (1 3/8 po)
Moyen (1 9/16 po)
Grand (2 po)

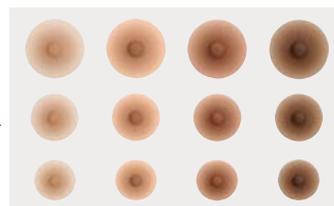

Emballage 2 par boîte



COUSSINETS PROTECTEURS ET PELLICULES POUR PROTHÈSES CONTACT

- Le coussinet protecteur permet de porter les prothèses adhésives façon traditionnelle, dans un soutien-gorge à pochettes
- Les pellicules protègent l'adhésif durant l'entreposage
- Disponible dans différentes tailles selon le style de la prothèse voir le schéma pour plus d'informations

Style Voir le schéma
Emballage 1 coussinet protecteur
2 pellicules par sac

GUIDE DES TAILLES DES COUSSINETS PROTECTEURS

PROTHÈSE	COUSSINET	TAILLE DU COUSSINET	TAILLE DE PROTHÈSE														
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
386C	171 G/D			1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13
385C	168			3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11			
384C	167			1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	13	13
383C	170 G/D		1	1	1	3	3	5	5	7	7	10	10	12	12		
382C	168			3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11		
381C	172			3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11		
380C	172			3	3	3	5	5	7	7	9	9	11	11	11	13	13



COUVRE-PROTHÈSES


- Le couvre-prothèse protège la prothèse mammaire
- Tissu doux sans couture sur le devant
- Ouverture à l'arrière
- Peut être lavé, lavage à la main à 85 ° F
- Style 156 convient pour une forme de prothèse 2A, style 160 pour 2S et 3S

Style 156
Couleur Ivoire
Tailles 1-14 G/D
Forme 392,393
Emballage 1 Couvre

Style 160
Couleur Ivoire
Tailles 1-17
Forme 442, 440, 391, 390, 385C, 382C, 381C, 380C, 363, 342N, 320, 310
Emballage 1 Couvre

CONTACT MULTI

La prothèse Contact Multi d'Amoena est un coussinet de silicone avec le même système adhésif sécurisé qu'Amoena utilise pour ses prothèses mammaires Contact. Le coussinet adhère bien à toutes les prothèses symétriques d'Amoena 2S, 2S^N, 3S ou 3E, ce qui permet à la prothèse de se fixer à la poitrine. Puisque le coussinet est retiré chaque fois que la prothèse est enlevée – la prothèse devient plus polyvalente puisqu'on peut maintenant décider si on portera la prothèse fixée ou non.

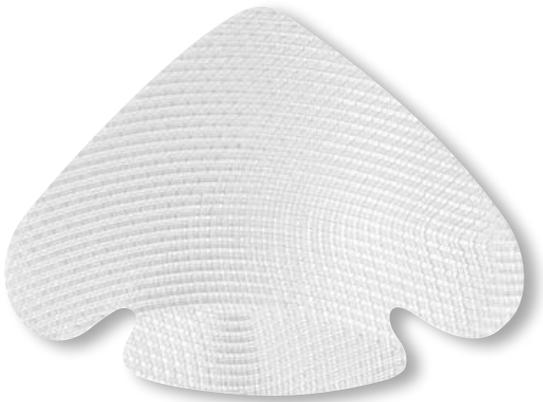

Cette image illustre comment le coussinet Contact Multi s'adapte à une prothèse. (Prothèse non comprise)

CE QUI PLAIRA À VOS CLIENTES

- Le coussinet Contact Multi est fait de silicone durable et douce avec un adhésif sur les deux côtés – le premier côté adhère à une prothèse Amoena Natura ou Essential; le deuxième adhère à la poitrine
- Le coussinet est facile à appliquer, porter et enlever – offrant ainsi aux femmes une nouvelle solution et une plus grande liberté de choix
- Porter une prothèse mammaire fixée permet aux femmes de ressentir moins de lourdeur et plus de flexibilité quand vient le temps de choisir quels vêtements porter
- Comme toutes prothèses mammaires Amoena, le coussinet Contact Multi requiert une poitrine propre et sèche pour une adhérence maximale. Un nettoyage quotidien avec le Nettoyant Doux Amoena et la Brosse Douce (inclus avec le coussinet) est nécessaire

Le coussinet est conçu pour être porté sur une prothèse mammaire Amoena et avec un soutien-gorge pour un support complet. Amoena n'est pas responsable des dommages causés par le fait de placer le coussinet Contact Multi sur une autre marque de prothèse mammaire.

- Style 037 Convient aux prothèses Amoena 2S*, tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
- Style 038 Convient aux prothèses Amoena 3S*, tailles 0/1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
- Style 040 Convient aux prothèses 2S^N*, tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14
- Style 041 Convient aux prothèses 3E*, tailles 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10

Côté G/D

Emballage Une lingette en microfibre, le Nettoyant Doux Amoena (30ml) et une Brosse Douce
Le format de Nettoyant Doux de 150 ml est vendu séparément.

Voir la p. 42 pour en savoir plus sur nos produits pour l'entretien des prothèses.

*Usage recommandé avec les prothèses Amoena Natura et Essential seulement.

TEXTILES

DES VÊTEMENTS QUI OFFRENT BEAUCOUP PLUS

Nous offrons une large gamme de soutiens-gorge à pochettes, d'ensembles lingerie assortis, de vêtements et de maillots. Que votre cliente souhaite ajouter une touche féminine ou une touche design à sa garde-robe, nous nous assurons que nos vêtements supportent son corps de la meilleure façon possible.

LINGERIE AMOENA

Pour vous aider à trouver le style approprié, nous avons regroupé nos soutiens-gorge à pochettes en plusieurs segments.


LINGERIE p. 47

ACTIVE p. 70

LOISIRS p. 72

TEXTILES

CARACTÉRISTIQUES

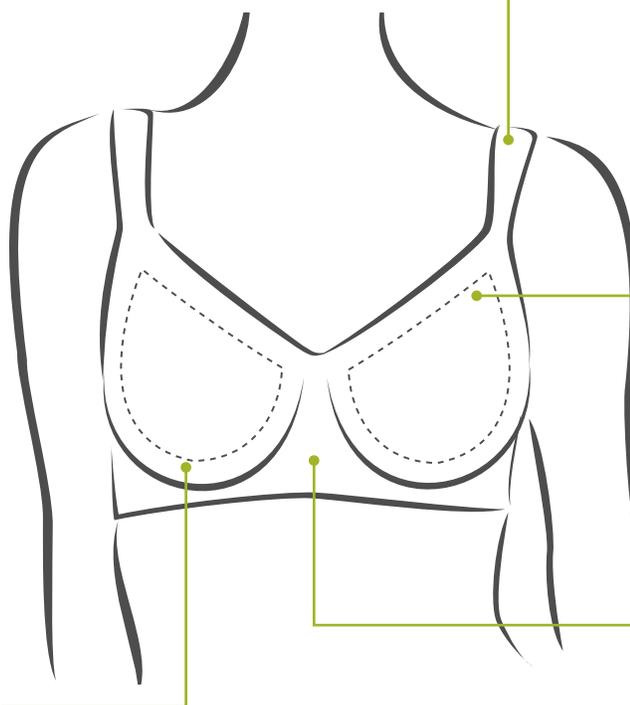

Bretelles confortables : Des bretelles ajustables et confortables qui soutiennent une prothèse sans exercer la moindre pression sur les épaules. Certains modèles ont des bretelles élargies et coussinées, pour bien soutenir les plus grandes tailles et obtenir un confort ajouté.

La plupart de nos styles sont pourvus de bretelles réglables qui augmentent en largeur pour maintenir un soutien optimal dans les plus grandes tailles.

Pochettes discrètes : Tous les soutiens-gorge Amoena sont dotés de pochettes discrètes qui maintiennent une prothèse mammaire bien en place.


Les pochettes sont fabriquées de différents matériaux doux et perméables à l'air et sont imperceptibles à travers le bonnet lorsqu'une prothèse n'y est pas insérée – permettant ainsi à toutes les femmes de pouvoir porter les soutiens-gorge Amoena.

Large bande : Une bande plus large procure soutien et stabilité, afin de garantir que votre prothèse ou votre complément mammaire reste bien en place.

Bonnets flexibles : Nos bonnets suivent précisément la forme d'une prothèse mammaire afin d'assurer un ajustement parfait. Les bords élastiques offrent une sécurité supplémentaire.

Attache variable : Une fermeture au dos, comprenant entre de 2 et 11 agrafes, selon la taille, assure le niveau adéquat de maintien.

Plusieurs styles comportent une douce fermeture à agrafes, légèrement rembourrée au dos pour encore plus de confort.

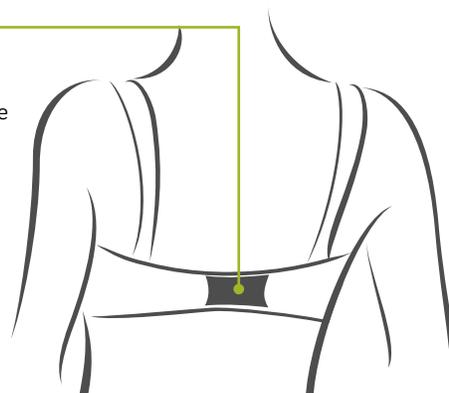



AMANDA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ ⊖ 2,4

Style 44536 Blanc

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 34-48 A, B, C, D, DD, DDD; 36-46 G

Agrafes 2 rangées : 34-38 A, 34-36 B, 34 C
3 rangées : 40-48 A, 38-48 B, 36-48 C,
34-44 D, 34-42 DD, 34-40 DDD, 36-38 G
4 rangées : 48 C, 46-48 D, 44-48 DD, 42-48 DDD, 40-46 G

Composition Bonnet A, B, C : 73 % Nylon, 17 % Spandex, 5 % Polyester, 5 % Polyuréthane
Bonnet D, DD, DDD, G : 73 % Nylon, 19 % Spandex, 4 % Polyester, 4 % Polyuréthane



- Support en demi-lune sur le côté du bonnet spécialement conçu pour supporter les plus grandes tailles
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



AMANDA À ARMATURE

▲ ◡ ⊕ ⊖ 2,4

Style 44538 Blanc

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 34-48 A, B, C, D, DD, DDD; 36-46 G

Agrafes 2 rangées : 34-38 A, 34-36 B, 34 C
3 rangées : 40-48 A, 38-48 B, 36-48 C, 34-44 D,
34-42 DD, 34-40 DDD, 36-38 G
4 rangées : 48 C, 46-48 D, 44-48 DD, 42-48 DDD, 40-46 G

Composition Bonnet A, B, C : 73 % Nylon, 20 % Spandex, 7 % Polyester
Bonnet D, DD, DDD, G : 74 % Nylon, 22 % Spandex, 4 % Polyester



- Support en demi-lune sur le côté du bonnet spécialement conçu pour supporter les plus grandes tailles
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



AMBER BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ⊕ ⊖ 1,4

Style 44259 Noir

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 32-42 AA, A, B, C, D, DD

Agrafes 2 rangées : 32-42 AA, A; 32-40 B;
32-38 C; 32-36 D; 32-34 DD
3 rangées : 42 B; 40-42 C; 38-42 D;
36-42 DD

Composition 79 % Nylon, 21 % Spandex



- Bonnets en mousse douce avec une délicate superposition de dentelle pour un effet camisole
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1
Moulé

2
Coupé
et cousu

3
Tulle

4
Microfibre

5
Coton

6
COOLMAX®

7
Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée.

AMANDA BUSTIER À BONNETS SOUPLES

Style 44537 Blanc
 Bonnets Affaissé/Moyen
 Tailles 34-42 A, B, C, D
 Agrafes 2 rangées : 34-38 A, 34-36 B, 34 C
 3 rangées : 40-42 A, 38-42 B,
 36-42 C, 34-42 D



Composition Bonnet A, B, C : 78 % Nylon, 19 % Spandex,
 3 % Polyester
 Bonnet D : 78 % Nylon, 20 % Spandex,
 2 % Polyester

- Design moderne pour un décolleté plongeant, conçu spécifiquement pour les femmes qui portent un complément mammaire
- Tissu jacquard élégant avec panneaux de dentelle
- Pochettes à l'intérieur des bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables

CULOTTE AMANDA

Style 44539 Blanc
 Tailles 6-24
 Composition 77 % Nylon, 11 % Spandex,
 7 % Coton, 5 % Polyester



- Aucun élastique pour un port confortable et invisible
- Panneau en dentelle au dos pour une touche d'élégance

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes
bilatérales



À armature



Bonnets
souples



Bonnets
coupés et
cousus



Bonnets en
mousse coupés
et cousus



Bonnets
moulés



Bonnets en
mousse moulé



Bretelles
confort



Renforts
latéraux



Haute teneur
en coton

Avec
COOLMAX®
pochettes



ANNABELL BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,6

Style 2126 Blanc Beige Perle Noir
 Bonnets Moyen
 Tailles Blanc, Beige Perle : 34-38 AA; 32-40 A, B, C, D
 Noir : 34-38 AA; 34-40 A, B, C, D
 Agrafes 2 rangées : 34-38 AA; 34-38 A, B; 34-36 C
 3 rangées : 40 A, B; 38-40 C; 34-40 D
 Composition 51 % Nylon, 36 % Polyester (COOLMAX®),
 11 % Spandex, 2 % Rayonne



- Bordure en dentelle, design texturé aux bonnets
- Pochettes en tissu respirant COOLMAX® aux bonnets
- Bretelles Ajustables. Élastique, 34-38 AA; 34-38 A, B; 34-36 C; Rigide, 40 B; 38-40 C, 34-40 D



ANNETTE À ARMATURE

▲ ◡ ⊕ ⊖ ⊕ 1,4

Style 44028 Blanc Cassé
 1087 Noir/Nu
 Bonnets Moyen
 Tailles 34-48 B, C, D; 34-46 DD;
 34-44 DDD; 34-42 G
 Agrafes 2 rangées : 34-38 B; 34-36 C; 34 D
 3 rangées : 40-48 B; 38-48 C; 36-48 D;
 34-46 DD; 34-44 DDD; 34-42 G
 Composition 80 % Nylon, 20 % Spandex



- Superposition de dentelle sur tissu uni en microfibre aux bonnets
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles larges, coussinées, élastiques et ajustables



CULOTTE ANNETTE*

Style 44029 Blanc Cassé
 Tailles 8-20
 Composition 73 % Nylon, 20 % Spandex, 7 % Coton



CULOTTE TAILLE HAUTE ANNETTE*

Style 44030 Blanc Cassé
 Tailles 8-20
 Composition 66 % Nylon, 24 % Coton, 10 % Spandex



*Jusqu'à épaisseur des stocks

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1
Moulé

2
Coupé
et cousu

3
Tulle

4
Microfibre

5
Coton

6
COOLMAX®

7
Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 49

AURELIE BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS




1,4

Style	44155	Blanc Cassé
	44279	Noir
Bonnets	Moyen	
Tailles	32-44 AA, A, B, C, D, DD	
Agrafes	2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D	
	3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D; 32-44 DD	



Composition 46 % Nylon, 37 % Polyester, 17 % Spandex

- Dentelle luxueuse et tissu jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes bilatérales



À armature



Bonnets souples



Bonnets coupés et cousus



Bonnets en mousse coupés et cousus



Bonnets moulés



Bonnets en mousse moulé



Bretelles confort



Renforts latéraux



Haute teneur en coton



AURELIE BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ | 2,4

Style 44153 Blanc Cassé 44277 Noir
 Bonnets Moyen
 Tailles 32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD
 Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D
 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C;
 34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD



Composition Bonnet A, B, C : 67 % Nylon, 25 % Spandex, 8 % Polyester
 Bonnet D, DD, DDD : 68 % Nylon, 26 % Spandex, 6 % Polyester

- Dentelle luxueuse et tissu jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes, coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



AURELIE À ARMATURE

▲ ◡ ⊕ | 2,4

Style 44154 Blanc Cassé 44278 Noir
 Bonnets Moyen
 Tailles 32-44 A, B, C, D, DD; 34-42 DDD
 Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D
 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C;
 34-44 D; 32-44 DD; 34-42 DDD



Composition Bonnet A, B, C : 67 % Nylon, 24 % Spandex, 9 % Polyester
 Bonnet D, DD, DDD : 67 % Nylon, 25 % Spandex, 8 % Polyester

- Dentelle luxueuse et tissu jacquard avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre dans les bonnets
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



CULOTTE AURELIE

Style 44156 Blanc Cassé 44280 Noir
 Tailles 6-20
 Composition 55 % Nylon, 26 % Spandex, 11 % Coton, 8 % Polyester



- Inserts de dentelle à l'avant et au dos pour refléter la dentelle des soutiens-gorge Aurelie
- Tissu jacquard offre un fini perlé pour un effet luxueux
- Breloque en cristal sur la boucle du centre, avec bordure dorée pour plus d'élégance

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1
Moulé

2
Coupé et cousu

3
Tulle

4
Microfibre

5
Coton

6
COOLMAX®

7
Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée.



AVA BONNETS SOUPLES



Style	2115	Blanc	Beige Perle
Bonnets	Fort		
Tailles	34-52 B; 34-50 C; 52 C*; 36-46 D, DD		
Agrafes	3 rangées : 34-46 B; 34-46 C; 36-38 D 4 rangées : 48-52 B,C; 40-46 D; 36-46 DD		
Composition	38 % Coton, 27 % Polyester, 26 % Nylon, 7 % LYCRA®, 2 % Spandex		



- Soutien-gorge en M qui procure un excellent soutien, spécialement pour un profil de poitrine fort
- Pochettes en coton aux bonnets
- Bonnets rembourrés en fibres Fibrefill
- Bretelles ajustables et rigides

*Taille 52C disponible tant qu'il y en aura



Options de bretelles

BARBARA REMBOURRÉ À ARMATURE



Style	0457	Nu
Bonnets	Moyen	
Tailles	32-40 A, B, C; 32-38 D	
Agrafes	3 rangées : 32-40 A, B, C; 32-38 D	
Composition	72 % Nylon, 14 % Spandex, 14 % Polyester	



- Conçu dans un tissu à effet lisse pour un look impeccable
- Mousse moulée; bonnets à pochettes
- Plusieurs options pour les bretelles : strapless, droites, croisées ou en licou; emballé avec des bretelles transparentes supplémentaires pour une option de bretelles invisible



Nouvelles Couleurs

COTON BIOLOGIQUE



BECKY BONNETS SOUPLES SANS COUTURE



Style	44676	Blanc Cassé (disponible Février)
	44677	Rose Nu (disponible Février)
	44418	Nu (jusqu'à épuisement des stocks)
Bonnets	Moyen	
Tailles	S (32-36 A; 32-34 B; 32 C) M (38-40 A; 36-38 B; 34-36 C; 32-34 D) L (42-44 A; 40-42 B; 38-40 C; 36-38 D; 34-36 DD) XL (44-46 B; 42-44 C; 40-42 D; 38-40 DD) 2XL (46 C; 44-46 D; 42-46 DD) 44677, 44418 only	
Composition	44677, 44418 : 60 % Coton Biologique, 32 % Nylon, 8 % Spandex; 44418 : 89 % Nylon, 11 % Spandex	



- Tissu tissé sans aucune couture ni fermeture inconfortables
- Bonnets moulés à pochettes
- Bretelles et sous-bande larges; effet drapé au centre pour une meilleure séparation
- Soutien-gorge idéal pour dormir

CARACTÉRISTIQUES





BELLA BONNETS SOUPLES



Style 2114 Blanc Beige Perle
 Bonnets Affaissé/Moyen
 Tailles 34-42 A; 34-44 B; 34-46 C; 36-46 D
 Agrafes 2 rangées : 34-38 A, B; 34 C
 3 rangées : 40-42 A; 40-44 B; 36-38 C
 4 rangées : 40-46 C; 36 D
 5 rangées : 40-46 D



Composition 58 % Nylon, 30 % Coton, 6 % Spandex, 6 % LYCRA®

- Tissu Jacquard et bonnets rembourrés en fibres Fiberfill
- Pochettes en coton
- Bretelles élastiques et ajustables



BIANCA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS



Style 44216 Blanc
 Bonnets Moyen
 Tailles 32-42 AA, A, B, C, D
 Agrafes 2 rangées : 32-42 AA; 32-40 A; 32-38 B;
 32-36 C; 32 D
 3 rangées : 42 A; 40-42 B; 38-42 C; 34-42 D



Composition 77 % Nylon, 23 % Spandex



Option
dos nageur



DANA BONNETS SOUPLES



Style 0862 Blanc
 0750 Noir
 Bonnets Moyen
 Tailles 32-40 AA; 32-44 A, B, C; 34-42 D, DD
 Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B, C; 34 D
 3 rangées : 40-44 A; 38-44 B, C; 36-42 D; 34-42 DD



Composition 87 % Nylon, 13 % Spandex

- Soutien-gorge camisole en micro tissu Jacquard
- Bonnets moulés en microfibre avec pochettes
- Bretelles décoratives, élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1
Moulé

2
Coupé
et cousu

3
Tulle

4
Microfibre

5
Coton

6
COOLMAX®

7
Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 53

Ce style saisonnier fait maintenant partie de notre Collection Permanente.

CELINE BONNETS SOUPLES



Style 44509 Rose Nu/Gris

Bonnets Moyen

Tailles 34-42 A, B, C, D

Agrafes 2 rangées : 34-42 A; 34-40 B;
34-38 C; 34-36 D

3 rangées : 42 B; 40-42 C; 38-42 D

Composition 80 % Nylon, 14 % Spandex, 6 % Polyester



- Soutien-gorge à haut effet couvrant avec devant ajustable, offrant ainsi deux options différentes: soutien-gorge camisole tombant plus haut ou soutien-gorge régulier tombant plus bas
- Dentelle discrète avec un effet subtil double-ton

CULOTTE CELINE

Style 44512 Rose Nu/Gris

Tailles 6-16

Composition 65 % Nylon, 24 % Spandex,
11 % Coton



- S'agence avec le soutien-gorge Celine
- Dentelle discrète avec un effet subtil double-ton

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes bilatérales



À armature



Bonnets souples



Bonnets coupés et cousus



Bonnets en mousse coupés et cousus



Bonnets moulés



Bonnets en mousse moulé



Bretelles confort



Renforts latéraux



Haute teneur en coton



DIANNA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊙ () 1,4

Style	44112	<input type="checkbox"/>	Blanc
	44116	<input type="checkbox"/>	Rose Nu
	44107	<input type="checkbox"/>	Noir



Bonnets Moyen
 Tailles 32-44 AA, A, B, C, D
 Agrafes 2 rangées : 32-42 AA; 32-40 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D
 3 rangées : 44 AA; 42-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D
 Composition 78 % Nylon, 19 % Spandex, 3 % Coton

- Tissu Jacquard texturé pour créer de l'élégance
- Bonnets moulés en microfibre MicroSense avec pochettes
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



CULOTTE DIANNA*

Style	44113	<input type="checkbox"/>	Blanc
	44108	<input type="checkbox"/>	Noir
	44117	<input type="checkbox"/>	Rose Nu



Tailles 6-16
 Composition 72 % Nylon, 21 % Spandex,
 7 % Coton

*Jusqu'à épuisement des stocks



DOROTHY BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊙ () 2,5

Style	2123	<input type="checkbox"/>	Blanc	<input type="checkbox"/>	Beige Perle
Bonnets	Affaissé				
Tailles	32-38 AA; 32-42 A; 32-44 B; 34-44 C				
Agrafes	2 rangées : Bonnets AA, A; 32-38 B; 34-36 C 3 rangées : 40-44 B; 38-44 C				



Composition 36 % Polyester, 35 % Coton, 21 % Nylon,
 7 % Spandex, 1 % Polyuréthane

- Bonnets rembourrés en fibres Fibrefill avec tissu texturé Jacquard
- Pochettes en coton
- Bretelles ajustables : Élastique, 34-38 AA; 34-42 A; 34-38 B; 34-36 C; Rigide, 40-44 B; 38-44 C

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moulé | Coupé et cousu | Tulle | Microfibre | Coton | COOLMAX® | Autre |

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 55



ELLA BONNETS SOUPLES

2,3

Style 2133 Blanc Beige Perle Noir

Bonnets Fort

Tailles 34-42 B; 34-46 C, D, DD; 36-42 DDD

Agrafes 3 rangées : 34-42 B, C; 34-40 D, DD
4 rangées : 44-46 C; 42-46 D, DD; 36-42 DDD

Composition 60 % Polyester, 31 % Nylon, 9 % Spandex



- Tissu floral Jacquard avec bonnets rembourrés en fibres Fibrefill
- Pochettes respirantes en tulle
- Dos en tissu Powernet pour procurer support et confort au quotidien



ELLEN BONNETS SOUPLES

2,4

Style 44419 Rose Nu

44245 Noir/Nu

Bonnets Moyen/Fort

Tailles 32-44 A, B, C, D, DD

Agrafes, Avant 5 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D
6 rangées : 40-44 A; 38-44 B; 36-42 C; 34-40 D; 32-38 DD
7 rangées : 44 C; 42-44 D; 40-44 DD

Agrafes, Arrière 2 rangées : 32-42 A; 32-40 B; 32-38 C; 32-36 D; 32-34 DD
3 rangées : 44 A; 42-44 B; 40-44 C; 38-44 D; 36-42 DD
4 rangées : 44 DD

Composition 78 % Nylon, 22 % Spandex



- Fermetures avant et arrière; un soutien-gorge idéal pour celles qui ont une amplitude de mouvements limitée
- Bonnets légèrement rembourrés en fibrefill
- Bretelles décoratives, élastiques et ajustables



ISABEL BONNETS SOUPLES

2,5

Style 2118 Blanc Noir
 Lueur de bougie

Bonnets Moyen

Tailles 36-38 AA; 34-42 A; 34-44 B, C; 34-42 D, DD

Agrafes 2 rangées : 38 AA; 34-44 A
3 rangées : 34-44 B, C; 34-40 D; 34-38 DD
4 rangées : 42 D; 38-42 DD

Composition 40 % Nylon, 32 % Coton, 18 % Polyester, 6 % Spandex,
4 % LYCRA®



- Soutien-gorge camisole avec un délicat panneau de dentelle
- Pochettes en coton
- Bretelles minces, élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

Pochettes bilatérales

À armature

Bonnets souples

Bonnets coupés et cousus

Bonnets en mousse coupés et cousus

Bonnets moulés

Bonnets en mousse moulé

Bretelles confort

Renforts latéraux

Haute teneur en coton

Nouveau
en Mars

Bretelles
ajustables

FLEUR
BONNETS SOUPLES ▲ ☹️ ⓪ () ☼ 2,5

Style	44672	<input type="checkbox"/>	Blanc (disponible en Mars)	
	44671	<input type="checkbox"/>	Nu (disponible en Mars)	
Bonnets	Affaissé/Moyen			
Tailles	XS (28/30); S (32/34); M (36/38); L (40/42); XL (44/46); 2XL (48/50)			
Bonnets	A/B, C/D, DD/DDD			
Agrafes	4 rangées : XS(A/B, C/D); S(A/B); M(A/B) 5 rangées : XS(DD/DDD); S(C/D, DD/DDD), M(C/D, DD/DDD); L(A/B, C/D); XL(A/B, C/D); 2XL(A/B, C/D) 6 rangées : L(DD/DDD); XL(DD/DDD) 7 rangées : 2XL(DD/DDD)			
Composition 90 % Coton, 10 % Spandex				

- Nouveau soutien-gorge qui se rapproche du soutien-gorge Frances, mais avec des bretelles ajustables rembourrées
- Maintient une prothèse mammaire, post-opératoire ou un complément bien en place
- Bretelles larges et ajustables
- Pour un support optimal, nous recommandons de porter une prothèse postopératoire avec ce soutien-gorge (Voir p. 42)

LINGERIE

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moulé | Coupé et cousu | Tulle | Microfibre | Coton | COOLMAX® | Autre |

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 57



ISADORA BONNETS SOUPLES 2,5,7

Style 0947  Blanc
 0948  Nu
 44114  Noir



Bonnets Moyen/Fort
 Tailles 34-50 A; 32-48 B, C, D; 32-44 DD, DDD, G
 Agrafes 2 rangées : 34-40 A; 32-40 B, C; 32-38 D
 3 rangées : 42-50 A; 42-48 B; 42-46 C; 40-44 D;
 32-42 DD; 32-40 DDD; 32-38 G
 4 rangées : 48 C; 46-48 D; 44 DD; 42-44 DDD; 40-44 G
 Composition 44 % Nylon, 29 % Polyester, 14 % Spandex, 13 % Coton

- Broderie décorative et tissu mesh sur les bonnets pour un look léger
- Pochettes en coton
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles larges, rembourrées et ajustables



CULOTTE ISADORA*

Style 44115  Noir
 Tailles 6-24

Composition 63 % Nylon, 18 % Spandex,
 11 % Polyester, 8 % Coton



*Jusqu'à épuisement des stocks



JASMIN BONNETS SOUPLES 2,5,7

Style 0900N  Blanc
 44233  Noir



Bonnets Affaissé/Moyen
 Tailles 32-40 AA, A, B; 34-40 C
 Agrafes 2 rangées : 32-40 AA, A, B; 34-40 C
 Composition 68 % Coton, 18 % Nylon, 7 % Spandex,
 7 % Polyester

- Tissu dentelle stretch pour un soutien-gorge léger et confortable
- Haut du bonnet élastique pour assurer un ajustement près du corps
- Pochettes en coton
- Larges bretelles, décoratives et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

 Pochettes bilatérales

 À armature

 Bonnets souples

 Bonnets coupés et cousus

 Bonnets en mousse coupés et cousus

 Bonnets moulés

 Bonnets en mousse moulé

 Bretelles confort

 Renforts latéraux

 Haute teneur en coton

KAROLINA BONNETS SOUPLES



Style	44505		Blanc/Nu Claire
Bonnets	Moyen		
Szes	32-42 A, B, C, D, DD		
Agrafes	2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D 3 rangées : 40-42 A; 38-42 B; 36-42 C; 34-42 D; 32-42 DD		
Composition	Bonnet A, B, C : 75 % Nylon, 20 % Spandex, 5 % Rayonne Bonnet D, DD : 75 % Nylon, 22 % Spandex, 3 % Rayonne		

- Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet, combinée au tissu lustré avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1	2	3	4	5	6	7
Moulé	Coupé et cousu	Tulle	Microfibre	Coton	COOLMAX®	Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 59



KAROLINA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

2,4

Style 44506 Blanc/Nu Claire
 Tailles 32-42 AA, A, B, C, D, DD
 Bonnets Moyen
 Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B;
 32-34 C; 32 D
 3 rangées : 42 AA; 40-42 A; 38-42 B; 36-42 C;
 34-42 D; 32-42 DD



Composition 55 % Nylon, 27 % Polyester, 14 % Spandex, 4 % Rayonne

- Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet, combiné tissu lustré avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



KAROLINA À ARMATURE

2,4

Style 44507 Blanc/Nu Claire
 Bonnets Moyen
 Tailles 32-42 A, B, C, D, DD
 Agrafes 2 rangées : 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32D
 3 rangées : 40-42 A; 38-42 B; 36-42 C;
 34-42 D; 32-42 DD



Composition Bonnet A, B, C : 77 % Nylon, 20 % Spandex, 3 % Rayonne
 Bonnet D, DD : 77 % Nylon, 21 % Spandex, 2 % Rayonne

- Dentelle luxueuse en éventail au haut du bonnet, combinée au tissu lustré avec pierre de cristal et dorure
- Pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques, ajustables et confortables



CULOTTE KAROLINA

Style 44508 Blanc/Nu Claire
 Tailles 6-16
 Composition 70 % Nylon, 18 % Spandex,
 10 % Coton, 2 % Rayonne



- La culotte complète le look séducteur de l'ensemble Karolina
- Dentelle luxueuse en éventail combinée au tissu lustré
- Pendentif au centre rappelle les soutiens-gorge Karolina

CARACTÉRISTIQUES

Pochettes bilatérales

À armature

Bonnets souples

Bonnets coupés et cousus

Bonnets en mousse coupés et cousus

Bonnets moulés

Bonnets en mousse moulé

Bretelles confort

Renforts latéraux

Haute teneur en coton

Nouveau
Disponible
Maintenant

**KITTY BONNETS SOUPLES
SANS COUTURE**



Style 44607  Rose Nu
44674  Magenta



Bonnets Moyen
Tailles S (32-38 A, 32-36 B, 32-3 C);
M (38-42 A, 36-40 B, 34-48 C, 32-36 D);
L (42-44 A, 40-44 B, 38-42 C, 36-40 D,
34-38 DD);
XL (44-46 B, 42-46 C, 40-44 D, 38-42 DD);
2XL (46 C, 44-46 D, 42-46 DD)

Composition 69 % Coton, 25 % Nylon, 6 % Spandex

- Soutien-gorge confort, sans couture, ajusteurs de bretelles, ni fermeture
- Bonnets moulés à pochettes
- La légère rembourrure aux bonnets peut se retirer si désiré
- Soutien-gorge idéal pour dormir

LINGERIE

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- 1**
Moulé
- 2**
Coupé
et cousu
- 3**
Tulle
- 4**
Microfibre
- 5**
Coton
- 6**
COOLMAX®
- 7**
Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 61

Avec tissu
COOLMAX®

KELLY BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ ⊖ 2,6

Style 2153 Nu

Bonnets Fort

Tailles 34-46 B, C, D, DD; 36-44 DDD

Agrafes 3 rangées : 34-42 B, C; 34-40 D; 34-40 DD
4 rangées : 44-46 B, C; 42-46 D, DD;
36-44 DDD



Composition 37 % Polyester (COOLMAX®), 28 % Polyester,
14 % Coton, 11 % Spandex, 10 % Nylon

- Pourvu d'une arcade sur la sous-bande pour aider à soulever le buste avec un support sans armature
- Pochettes respirantes en tissu COOLMAX®
- Dentelle décorative sur les bretelles offrant une touche féminine
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

Nouveau

COTON
BIOLOGIQUELARA COTON
BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◡ ● ⊕ ⊖ 1,5

Style 44673 Nu (disponible Février)

Bonnets Moyen

Tailles 34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD

Agrafes 2 rangées : 32-44 AA, A, B, C, D, DD

Composition 91 % Coton Biologique, 9 % Spandex



- Soutien-gorge légèrement rembourré, avec bonnets moulés sans couture pour un look lisse sous un T-shirt
- Pochettes respirantes en tulle
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques et ajustables

LARA BONNETS SOUPLES
REMBOURRÉS

▲ ◡ ● ⊕ ⊖ 1,4

Style 0752 Blanc Cassé
0674 Nu
0675 Noir

Bonnets Moyen

Tailles 34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD

Agrafes 2 rangées : 34-40 AA; 32-44 A, B, C, D, DD

Composition 84 % Nylon, 16 % Spandex



- Élégance confortable avec bordure en satin et pierre en strass au centre
- Bonnets moulés, sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

Pochettes
bilatérales

À armature

Bonnets
souplesBonnets
coupés et
coususBonnets en
mousse coupés
et coususBonnets
moulésBonnets en
mousse mouléBretelles
confortRenforts
latérauxHaute teneur
en coton



LARA SATIN BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

Style 44214  Nu
44212  Noir

Bonnets Moyen
Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD
Agrafes 2 rangées : 32-44 AA, A, B, C, D, DD
Composition 74 % Nylon, 15 % Spandex,
11 % Polyester



- Élégance confortable avec bordure en satin et pierre en strass au centre
- Bonnets moulés, sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

Aplanit
le dos



MAGDALENA BONNETS SOUPLES

Style 0463  Nu

Bonnets Moyen/Fort
Tailles 34-48 B, C, D, DD, DDD
Agrafes 4 rangées : 34-42 B; 34-40 C;
34-38 D; 34-36 DD; 34 DDD
5 rangées : 44-48 B; 42-48 C;
40-48 D; 38-48 DD; 36-48 DDD
Composition 54 % Nylon, 24 % Spandex, 22 % Polyester



- Soutien-gorge à effet dos lisse, dans un tissu non-tissé, ultra confortable
- Panneau arrière plus haut pour un look uniforme sur les côtés et au dos
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles ajustables et rigides

Aplanit
le dos



MAGDALENA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

Style 44533  Nu

Bonnets Moyen
Tailles 32-42 AA, A, B, C, D
Agrafes 4 rangées : 32-42 AA, A, B; 32-40 C; 32-38 D
5 rangées : 42 C; 40-42 D
Composition 41 % Polyester, 36 % Nylon, 23 % Spandex



- Soutien-gorge à effet dos lisse, dans un tissu non-tissé, ultra confortable, idéal sous un T-shirt
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
- Tissu frais, en microfibre pour un lustre élégant
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles ajustables et rigides

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1
Moulé

2
Coupé
et cousu

3
Tulle

4
Microfibre

5
Coton

6
COOLMAX®

7
Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortables tout au long de la journée. 63

Nouveau
en Mars

LINGERIE

LEE BONNETS SOUPLES ▲ ◡ ● ♻️ 1,5

Style 44540 Blanc
(disponible en Mars)

Bonnets Moyen

Tailles 34-42 A, B, C, D; 34-40 DD

Agrafes 2 rangées : 34-40 A; 34-38 B;
34-36 C; 34 D

3 rangées : 2 A; 40-42 B; 38-42 C; 36-42 D;
34-40 DD

Composition 90 % Coton, 7 % Spandex,
2 % Polyuréthane, 1 % Nylon

- Pour notre 45^e anniversaire
- Soutien-gorge léger en coton à 90 %
- Bonnets moulés avec pochettes en coton
- Ruban Rose symbolique au centre
- Bretelles larges pour un ajustement confortable

45ans
1975-2020
amoena

CARACTÉRISTIQUES



Pochettes
bilatérales



À armature



Bonnets
souples



Bonnets
coupés et
cousus



Bonnets en
mousse coupés
et cousus



Bonnets
moulés



Bonnets en
mousse moulé



Bretelles
confort



Renforts
latéraux



Haute teneur
en coton

Nouvelle
Couleur



MARA BONNETS SOUPLES REMBOURRÉS

▲ ◐ ● 1,6

Style	44534		Blanc Cassé (disponible maintenant)
	1150		Nu Claire
	44416		Bleu Minuit
	44023		Gris Foncé



Bonnets Moyen/Fort
 Tailles 32-44 AA, A, B, C, D, DD
 Agrafes 2 rangées : 32-40 AA; 32-38 A; 32-36 B; 32-34 C; 32 D
 3 rangées : 42-44 AA; 40-44 A; 38-44 B; 36-44 C; 34-44 D;
 32-44 DD
 Composition 83 % Nylon, 11 % Spandex, 6 % Polyester (COOLMAX®)

- Soutien-gorge de style T-shirt, avec pochettes en tissu COOLMAX® pour rester au frais et bien sec
- Bonnets en mousse moulée sans couture
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques et ajustables

Dispose
d'un fini
NATUREXX®



MARLENA BONNETS SOUPLES

▲ ◐ ● 2,4

Style	2167N		Nu		Noir
Bonnets	Moyen				
Tailles	34-42 A, B, C; 32-42 D, DD				
Agrafes	2 rangées : 34-38 A, B, C; 32-38 D 3 rangées : 40-42 A, B, C, D; 32-42 DD				
Composition	82 % Nylon, 18 % Spandex				



- Arcade sur la sous-bande pour aider à soulever le buste avec un support sans armature
- Tissu NATUREXX® qui repousse l'humidité
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

MONA BONNETS SOUPLES

▲ ◐ ● () 1,4

Style	0606		Blanc
	0568		Champagne
	0614		Cognac
	0591		Noir
Bonnets	Moyen		
Tailles	32-42 AA, A, B; 34-40 C, D; 34-38 DD		
Agrafes	2 rangées : 32-40 AA, A; 32-38 B; 34-36 C, D, DD 3 rangées : 38 AA, A; 40-42 B; 38-40 C, D; 38 DD		
Composition	79 % Nylon, 21 % Spandex		



- Un ajustement, confort et support de haut niveau avec bonnets sans couture et tissu en microfibre texturé
- Bonnets moulés sans aucune couture et pochettes en microfibre
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables avec fermeture à agrafes coussinée au dos

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1
Moulé

2
Coupé
et cousu

3
Tulle

4
Microfibre

5
Coton

6
COOLMAX®

7
Autre

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 65

Nouveau
en Avril

MIRA
BONNETS SOUPLES ▲ ☽ ● () 1,4

Style	44610	☐	Taupe Clair (disponible en Avril)
Bonnets	Moyen		
Tailles	32-42 AA, A, B; 34-40 C, D; 34-38 DD		
Agrafes	2 rangées : 32-40 AA, A; 32-38 B; 34-40 C, D, DD		
	3 rangées : 42 AA, A; 40-42 B; 38-40 C, D; 38 DD		
Composition	79 % Nylon, 21 % Spandex		

- Nouveau soutien-gorge confort avec bonnets sans couture et un tissu en microfibre texturé
- Bonnets moulés avec pochettes en microfibre
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



CARACTÉRISTIQUES



Pochettes
bilatérales



À armature



Bonnets
souples



Bonnets
coupés et
cousus



Bonnets en
mousse coupés
et cousus



Bonnets
moulés



Bonnets en
mousse moulé



Bretelles
confort



Renforts
latéraux



Haute teneur
en coton

Pochettes
en tissu
COOLMAX®



NANCY BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,6

Style	44480	Blanc
	1151	Nu Claire
	44417	Bleu Minuit
	44024	Gris Fpncé



Bonnets Moyen/Fort
 Tailles 32-44 B; 34-52 C, D; 34-50 DD, DDD, G
 Agrafes 2 rangées : 32-36 B; 34 C
 3 rangées : 38-42 B; 36-40 C; 34-38 D; 34-36 DD; 34 DDD
 4 rangées : 44 B; 42-52 C; 40-52 D; 38-50 DD; 36-46 DDD;
 34-50 G
 Composition 38 % Polyester, 31 % Nylon, 22 % Polyester (COOLMAX®),
 9 % Spandex

- Facile à ajuster, ce soutien-gorge présente une dentelle florale à l'encolure
- Pochettes respirantes en tissu COOLMAX® aident à repousser l'humidité
- Fermeture à agrafes coussinée au dos
- Bretelles élastiques et ajustables



RITA BONNETS SOUPLES

▲ ◡ ⊕ 2,6

Style	2004	Nu
	44234	Bleu Minuit



Bonnets Moyen/Fort
 Tailles 34-44 A, B, C; 34-46 D; 36-46 DD
 Agrafes 2 rangées : 34-44 A; 34-38 B; 34-36 C
 3 rangées : 40-44 B; 38-44 C; 34-38 D; 36-38 DD
 4 rangées : 40-46 D, DD
 Composition 77 % Polyester, 19 % Nylon, 4 % Spandex

- Le tissu est légèrement brillant et l'encolure en dentelle extensible épouse le corps
- Pochettes en tissu respirant COOLMAX® aux bonnets aident à rester au frais et sec
- Bretelles élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- | | | | | | | |
|----------|-------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moulé | Coupé
et cousu | Tulle | Microfibre | Coton | COOLMAX® | Autre |

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 67

Nouveau

TANYA BONNETS SOUPLES

Style	44678	 Nu	
	44679	 Noir	
Bonnets	Moyen		
Tailles	32-42 A, B, C, D		
Agrafes	2 rangées : 32-40 A; 32-38 B; 32-36 C; 32-34 D		
	3 rangées : 42 A; 40-42 B; 38-42 C; 36-42 D		
Composition	69 % Coton, 18 % Nylon, 13 % Spandex		

- Haute teneur en coton biologique
- Bonnets moulés; effet lisse sous les vêtements
- Bretelles larges pour plus de confort
- Bretelles élastiques et ajustables

CARACTÉRISTIQUES

68										
	Pochettes bilatérales	À armature	Bonnets souples	Bonnets coupés et cousus	Bonnets en mousse coupés et cousus	Bonnets moulés	Bonnets en mousse moulé	Bretelles confort	Renforts latéraux	Haute teneur en coton

ACCESSOIRES DE LINGERIE




HAUT AMBER

Style 44268 Blanc
44261 Noir

Tailles 34-42 A/B, C/D, DD/DDD
Composition 76 % Nylon, 24 % Spandex
Emballage 1 par boîte

- Un accessoire dentelle idéal pour transformer presque n'importe quel soutien-gorge en cami sport
- S'accroche facilement et solidement aux bretelles avec les attaches
- Offre une solution pratique pour les encolures plongeantes lors de présence de cicatrices ou de marques de radiothérapie
- Voir aussi le soutien-gorge Amber à la p. 47

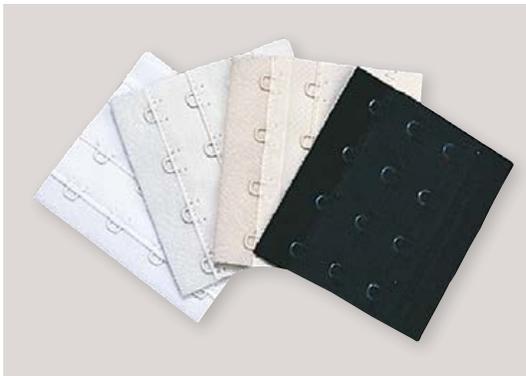

RALLONGES POUR SOUTIEN-GORGE

Style 193 Blanc
 Lueur de bougie
 Beige Perle
 Noir

Emballage Rouleau de 36 po

- 4 Agrafes



POCHETTES POUR SOUTIEN-GORGE

Style 191 Blanc
 Lueur de bougie
 Beige Perle
 Noir

Tailles S(32-36); M(38-42); L(44-46)
Composition 86 % Nylon/14 % Spandex
Emballage 2 par sac

- Ajoutez des pochettes à n'importe quel soutien-gorge
- Instructions de couture comprises



COUSSINETS POUR ÉPAULES EN SILICONE

Style 050
052 Présentoir
Tailles Unique
Emballage 2 par boîte



- Solution confortable pour les bretelles qui ont tendance à s'enfoncer dans l'épaule
- Les coussinets en silicone souples et transparents se glissent facilement par-dessus des bretelles de taille standard
- Peuvent contribuer à répartir le poids chez certaines femmes atteintes de certains problèmes de santé
- Le présentoir contient 12 ensembles de coussinets

CAMI SPORT ZIP

▲ ◡ ⊕ 2,4

Style 44070 ■ Noir

Bonnets Moyen

Tailles S (32-38 A, 32-34 B, 32 C);

M (38-40 A, 36-40 B,
34-38 C, 34 D);L (42-44 A, 40-44 B, 38-42 C,
36-40 D, 36-38 DD);XL (44-46 B, 42-46 C,
40-44 D, 38-42 DD)

Composition 82 % Micro Nylon, 18 % Spandex

**Support
moyen**

- Cami Sport à dos nageur et fermeture zip à l'avant pour plus de facilité
- Agrafes discrètes sous la fermeture zip procurent encore plus de sécurité
- Pochettes en microfibre

CARACTÉRISTIQUES

Pochettes
bilatérales

À armature

Bonnets
souplesBonnets
coupés et
coususBonnets en
mousse coupés
et coususBonnets
moulésBonnets en
mousse mouléBretelles
confortRenforts
latérauxHaute teneur
en coton



ESTER BONNETS SOUPLES

▲ ◐ 1,4

Style	42576		Blanc
	42577		Noir/Gris
Tailles	34-44 A, B, C, D; 36-42 DD		
Agrafes	7 rangées : 34-38 A; 34-36 B; 34 C		
	8 rangées : 40-44 A; 38-42 B; 36-40 C;		
	34-38 D; 36 DD		
	9 rangées : 44 B; 42-44 C; 40-44 D; 38-42 DD		
Composition	82 % Nylon, 18 % Spandex		



Support moyen

- Le soutien-gorge postopératoire Ester s'utilise aussi comme soutien-gorge sport
- Tissus synthétiques laissant circuler l'air; mailles sur le côté et au dos aide à l'évacuation de l'humidité
- Bonnets moulés et lisses, discrets sous les vêtements
- Fermeture avant pour plus de facilité
- Bretelles larges, rembourrées et ajustables



PERFORMANCE CAMI SPORT

▲ ◐

Style	0654		Blanc
	0658		Noir
	0794		Nu
Bonnets	Moyen		
Tailles	Blanc, Noir : 32-42 AA, A, B, C, D, DD		
	Nu : 34-42 A, B, C, D, DD		
Agrafes	3 rangées : 32-42 AA, A, B, C, D, DD		
Composition	85 % Nylon, 15 % Spandex		



Support léger

- Côtés et panneau avant en tissu mesh pour permettre à l'humidité de s'échapper
- Bonnets moulés et sans couture avec pochettes en microfibre
- Fermeture standard de soutien-gorge à l'arrière
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables



POWER CAMISOLE SPORT

▲ ◐ 1,6

Style	1152		Noir/Gris
Bonnets	Moyen/Fort		
Tailles	32-42 AA, A, B, C, D, DD		
Agrafes	3 rangées : 32-42 AA, A, B, C, D, DD		
Composition	84 % Nylon, 16 % Spandex		



Support moyen

- Tissu mesh détaillé à l'avant pour un look sport; le tissu mesh assure une ventilation
- Bonnets moulés sans couture avec pochettes
- Fermeture standard de soutien-gorge à l'arrière
- Bretelles rembourrées, élastiques et ajustables

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

- | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moulé | Coupé et cousu | Tulle | Microfibre | Coton | COOLMAX® | Autre |

Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortables tout au long de la journée. 71

AMOENA LOISIRS

VALLETTA CAMISOLE



Style	70230		Blanc
	44075		Nu
	44076		Mélange Charbon
	70229		Noir

Tailles 6-24

Composition 90 % Modal, 10 % Spandex

- Tissu Modal doux pour un confort ultime de jour comme de nuit (comme tenue de nuit, il est parfait !)
- Soutien-gorge intégré à pochettes avec bonnets doux et rembourrés pouvant maintenir une prothèse mammaire bien en place
- Idéal pour les femmes qui n'aiment pas porter un soutien-gorge en raison des effets du traitement
- Encolure ronde avant et arrière
- Bretelles spaghetti double et ajustables



Fabriqué à partir de Modal®, un tissu incroyablement doux – plus résistant à l'usure et à la décoloration, qui rétrécit moins que le coton et paraît même frais au toucher.



CARACTÉRISTIQUES



Pochettes bilatérales



Bonnets mousse

Nouvelle
Couleur



AMY BONNETS SOUPLES SANS COUTURE



Style 44310  Rose Nu
44311  Noir (disponible March)
Bonnets Moyen
Tailles S (32-36 A; 32-34 B; 32 C)
M (38-40 A; 36-38 B; 34-36 C; 32-34 D)
L (42-44 A; 40-42 B; 38-40 C; 36-38 D; 34-36 DD)
Composition 72 % Nylon, 28 % LYCRA®



- Matériau tissé sans couture ni fermeture inconfortables
- Bretelles et sous-bande extra larges
- Soutien-gorge idéal pour dormir
- Le LYCRA® procure un effet ajusté et une reprise de forme à long terme



NUISETTE GLAM



Style 44294  Noir
Tailles S, M, L, XL
Composition 95 % Rayonne, 5 % Spandex



- Douceur confortable, avec bretelles spaghetti qui s'ajustent à l'avant, pour ne ressentir aucune attache au dos en dormant
- Insertion de dentelle douce au centre à l'avant
- Soutien-gorge intégré à pochettes pour maintenir une prothèse mammaire ou postopératoire bien en place

STYLES ET TISSUS DES POCHETTES

1
Moulé

2
Coupé
et cousu

3
Tulle

4
Microfibre

5
Coton

6
COOLMAX®

7
Autre


Le tissu COOLMAX® évacue l'humidité et sèche rapidement. Ces propriétés respirantes permettent aux femmes de rester confortable tout au long de la journée. 73

AMOENA MAILLOTS

MAILLOTS



CARACTÉRISTIQUES DES MAILLOTS AMOENA

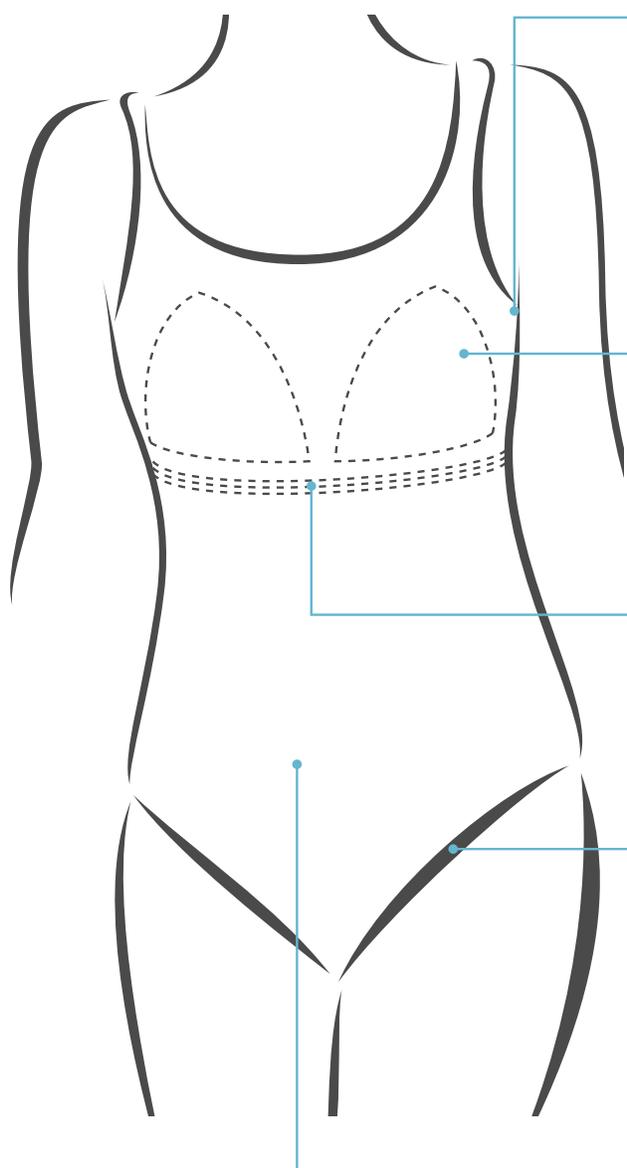

Haute couverture : Nos maillots tombent légèrement plus haut sous le bras pour un maintien maximum, sans pour autant couvrir excessivement.


Pochettes discrètes : Les maillots Amoena ont des pochettes spécifiquement adaptées des 2 côtés afin de permettre le maintien sécuritaire des prothèses mammaires tout en restant discrètes. Nos pochettes sont accessibles par le haut ainsi que par le côté, ce qui facilite la manipulation et assure ainsi que la prothèse reste bien en place dans la pochette.

Maintien du buste : Une sous-bande élastique et une forme unique des bonnets assurent un maintien maximal de la prothèse auprès du corps, faisant en sorte que la prothèse mammaire ne bouge ou ne glisse pas, même dans un maillot mouillé.

Coupe régulière : À moins qu'il ne soit précisé différemment, nos maillots ont une coupe régulière sur la jambe – ni trop haut, ni trop bas – convient et flatte tous les types de silhouettes.

Plusieurs Tailles : Pour assurer le meilleur ajustement possible, notre gamme de styles est disponible en différentes tailles de bonnets.

Dos : Varie approximativement entre 3 1/2 et 4 3/4 po dépendant du style de maillot

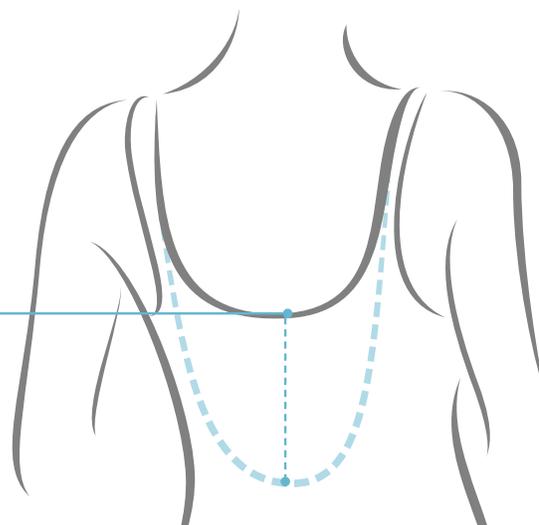



AYON HAUT TANKINI

Style 71116  Noir/Blanc
 Tailles 8-20 B, C
 Composition 80 % Nylon,
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

- Coupe en A pour avantager chaque silhouette
- Bretelles élastiques, larges et ajustables



AYON CULOTTE TAILLE HAUTE

Style 71118  Noir/Blanc
 Tailles 6-20
 Composition 80 % Nylon,
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

- Se porte comme culotte normale ou comme culotte taille haute
- Portée en taille haute, la hauteur des coutures sur le côtés est de 6 po dans une taille 8



AYON UNE PIÈCE

Style 71112  Noir/Blanc
 Tailles 8-26 B, C, D
 Composition 80 % Nylon,
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™

- Imprimé géométrique en noir et blanc, à encolure haute et insertion mesh pour camoufler cicatrices ou marques
- Effet plissé à l'avant sur les côtés pour créer une silhouette plus svelte
- Bretelles élastiques et ajustable



CARACTÉRISTIQUES





AYON SARONG



Style 71113  Noir/Blanc
Tailles 10-26 B, C
Composition 80 % Nylon,
20 % LYCRA® XTRA LIFE™



- Jupe courte avec effet plissé sur le ventre pour avantager la silhouette
- Culotte noire sous la jupe pour un effet plus couvrant
- Bretelles élastiques et ajustables

MAILLOTS



COCOS UNE PIÈCE



Style 71122  Noir/Blanc
Tailles 6-18 B, C, D
Composition 80 % Nylon,
20 % LYCRA® XTRA LIFE™



- Ligne coupée au laser en noir et blanc sous le buste
- Bretelles élastiques et ajustables



LYCRA® XTRA LIFE™ procure un ajustement longue durée, un maintien de la forme initiale et une haute résistance au chlore



COCOS TOP



Style 71123  Noir
 Tailles 6-16 B, C
 Composition 80 % Nylon,
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™



- Ouverture avant avec un zip décoratif
- Fronces à l'avant pour avantager la poitrine
- Bretelles élastiques, larges et ajustables


COCOS CULOTTE TAILLE MOYENNE



Style 71124  Noir
 Tailles 6-20
 Composition 80 % Nylon,
 20 % LYCRA® XTRA LIFE™



- Hauteur des coutures latérales est de 6 po dans une taille 8
- Plissé sur les côtés avantage la silhouette

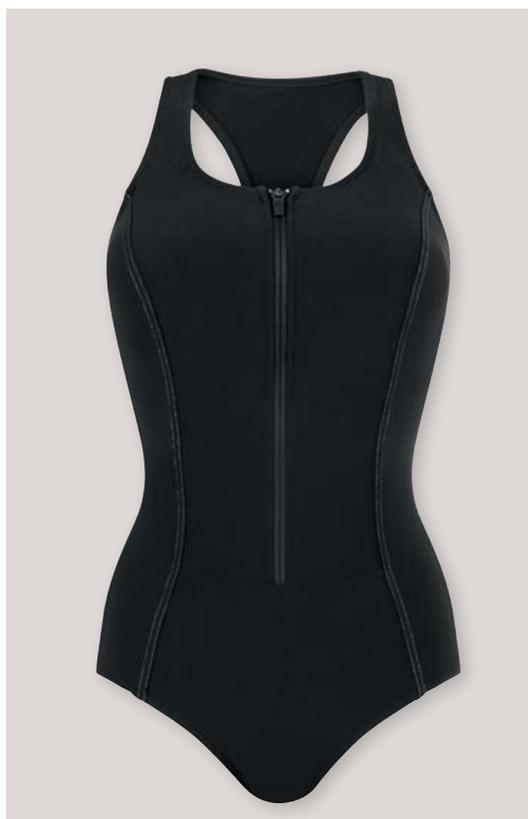

KEY WEST UNE PIÈCE



Style 71299  Marine Foncé
 71298  Noir
 Tailles 6-22 B, 8-20 C, D
 Composition 100 % Polyester



- Maillot Sport Une Pièce avec zip au centre, qui s'ouvre complètement pour un accès facile
- Panneau cousu à l'avant amincissant et confortable
- Coutures argentées et apparentes sur le panneau avant
- Dos nageur qui favorise les mouvements
- Doublure en tissu powermesh au haut du maillot pour plus de support
- Bonnets très doux
- Le tissu Darwin résiste 100 % au chlore

CARACTÉRISTIQUES





RHODES UNE PIÈCE



Style 70842  Marine Foncé
70654  Noir
Tailles 6-22 B, C
Composition 100 % Polyester



- Maillot Sport essentiel, une pièce et fait 100 % de tissu résistant au chlore. Idéal pour toute activité aquatique
- Doubles coutures à l'avant pour un effet amincissant
- Ajustement plus serré pour une tenue optimale et une silhouette incroyable



PROTHÈSE DE BAINADE AQUA WAVE

Style 149
Bonnetts Affaissé/Moyen
Tailles 1-14

- Prothèse en silicone transparente, à la forme unique, pour vos activités aquatiques
- Cette prothèse symétrique présente des ondulations à l'arrière pour permettre à l'air et à l'eau de circuler, afin de prévenir l'effet de succion
- Livrée dans un sac à cordon mode et étanche, assez grand pour contenir un maillot de bain humide

RESSOURCES

Avoir les bons outils, à portée de main, améliore et facilite votre expertise. Nous avons mis ici des chartes de tailles et de mesures pour les prothèses mammaires, la lingerie, et un condensé pratique des caractéristiques des prothèses mammaires pour une ressource en un coup d'œil.

RESSOURCES



TEXTILES – CARACTÉRISTIQUES

Tour de poitrine de 50 et plus, disponible dans **ces tailles**

	Page	Bonnets	Caractéristiques						Tailles de Bonnets								
			Bonnets Sans Couture	Bonnets Rembourrés	S'enfile par le haut	Camé	Fermeture Avant	Haute teneur en coton	AA	A	B	C	D	DD	DDD	G	H
Amanda Bonnets Souples	47	Moyen/Fort							34-48	34-48	34-48	34-48	34-48	34-48	34-48	36-46	
Amanda Bustier Bonnets Souples	48	Affaissé/Moyen							34-42	34-42	34-42	34-42					
Amanda à Armature	47	Moyen/Fort							34-48	34-48	34-48	34-48	34-48	34-48	34-48	36-46	
Amber Bonnets Souples Rembourrés	47	Moyen/Fort	•		•				32-42	32-42	32-42	32-42	32-42	32-42			
Amy Bonnets Souples Sans Couture	74	Moyen	•		•			Tailles S, M, L – voir fiche du produit pour les détails									
Annabell Bonnets Souples	49	Moyen							34-38	32-40	32-40	32-40	32-40				
Annette à Armature	49	Moyen	•							34-38	34-38	34-38	34-38	34-46	34-44	34-42	
Aurelie Bonnets Souples	51	Moyen							32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	34-42		
Aurelie Bonnets Souples Rembourrés	50	Moyen	•		•				32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44		
Aurelie à Armature	51	Moyen							32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	34-42		
Ava Bonnets Souples	52	Fort								34-52	34-52	36-46	36-46				
Barbara à Armature Rembourrés	52	Moyen	•		•				32-40	32-40	32-40	32-38					
Becky Bonnets Souples Sans Couture	52	Moyen	•		•			Tailles S, M, L, XL, 2XL – voir fiche du produit pour les détails									
Bella Bonnets Souples	53	Affaissé/Moyen							34-42	34-44	34-46	36-46					
Bianca à Armature Rembourré	53	Moyen		•					32-42	32-42	32-42	32-42	32-42				
Celine Bonnets Souples	54	Moyen				•			34-42	34-42	34-42	34-42					
Dana Bonnets Souples	53	Moyen	•		•				32-40	32-44	32-44	32-44	34-42	34-42			
Dianna Bonnets Souples	55	Moyen	•						32-44	32-44	32-44	32-44	32-44				
Dorothy Bonnets Souples	55	Affaissé							32-38	32-42	32-44	34-44					
Ella Bonnets Souples	56	Fort								34-42	34-46	34-46	36-42	36-42			
Ellen Bonnets Souples	56	Moyen/Fort					•		32-44	32-44	32-44	32-44	32-44				
Ester Sport Bonnets Souples	71	Moyen/Fort	•				•		34-44	34-44	34-44	34-44	36-42				
Fleur Loisirs Bonnets Souples	57	Affaissé/Moyen					•	Tailles XS, S, M, L, XL, 2XL – voir fiche du produit pour les détails									
Frances Loisirs Bonnets Souples	15	Affaissé/Moyen					•	Tailles XS, S, M, L, XL, 2XL – voir fiche du produit pour les détails									
Isabel Bonnets Souples	56	Moyen				•		36-38	34-42	34-44	34-44	34-42	34-42	34-42			
Isadora Bonnets Souples	58	Moyen/Fort							34-50	32-48	32-48	32-48	32-48	32-44	32-44	32-44	
Jasmin Bonnets Souples	58	Affaissé/Moyen					•	32-40	32-40	32-40	34-40						
Karolina Bonnets Souples	59	Moyen							32-42	32-42	32-42	32-42	32-42	32-42			
Karolina Bonnets Souples Rembourrés	60	Moyen	•						32-42	32-42	32-42	32-42	32-42	32-42			
Karolina à Armature	60	Moyen							32-42	32-42	32-42	32-42	32-42	32-42			
Kelly Bonnets Souples	62	Fort								34-46	34-46	34-46	34-46	36-44			
Kitty Seamless Bonnets Souples	61	Moyen	•		•			Tailles S, M, L, XL, 2XL – voir fiche du produit pour les détails									
Lara Coton Bonnets Souples Rembourrés	62	Moyen	•	•			•	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44			
Lara Bonnets Souples Rembourrés	62	Moyen	•	•				34-40	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44			
Lara Satin Bonnets Souples Rembourrés	63	Moyen	•	•				32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44			
Lee Coton Bonnets Souples	64	Moyen	•				•		32-42	32-42	32-42	32-42	34-40				
Magdalena Bonnets Souples	63	Moyen/Fort	•							34-48	34-48	34-48	34-48	34-48	34-48		
Magdalena Bonnets Souples Rembourrés	63	Moyen	•	•				32-42	32-42	32-42	32-42	32-42					
Mara Bonnets Souples Rembourrés	65	Moyen/Fort	•	•				32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44	32-44			
Marlena Bonnets Souples	65	Moyen	•						34-42	34-42	34-42	32-42	32-42				
Mira Bonnets Souples	66	Moyen	•					32-42	32-42	32-42	34-40	34-40	34-38				
Mona Bonnets Souples	65	Moyen	•					32-42	32-42	32-42	34-40	34-40	34-38				
Nancy Bonnets Souples	67	Moyen/Fort								32-44	34-52	34-52	34-50	34-50	34-50		
Rita Bonnets Souples	67	Moyen/Fort	•						34-44	34-44	34-44	34-46	36-46				
Performance Sport Bonnets Souples	71	Moyen	•					32-42	32-42	32-42	32-42	32-42	32-42				
Power Sport Bonnets Souples	71	Moyen/Fort	•					32-42	32-42	32-42	32-42	32-42	32-42				
Tanya Bonnets Souples	68	Moyen	•						32-42	32-42	32-42	32-42					
Zipper Sport Bonnets Souples	70	Moyen					•	Tailles S, M, L, XL – voir fiche du produit pour les détails									


TABLEAU DES TAILLES POUR LES COMPLÉMENTS BALANCE

Les tableaux ci-dessous servent de guide pour trouver une taille et une épaisseur pour commencer votre ajustement.

Si votre cliente a besoin d'un complément OVAL ou DELTA, utilisez la méthode de Mesure Croisée du Bonnet (MCB) pour trouver l'épaisseur requise.

La MCB est la mesure en partant du centre avant d'un soutien-gorge bien ajusté (au niveau du sternum) jusqu'au et la couture latérale.

1. Avec son soutien-gorge et ses bras baissés, mesurez le bonnet croisé du côté non opéré.
2. Ensuite, mesurez le bonnet croisé du côté opéré.
3. Soustrayez la mesure de l'étape 2 de la mesure de l'étape 1. Ce nombre final est la différence du bonnet croisé (MCB).
4. Trouvez ensuite la mesure sur le tableau ci-dessous pour savoir quelle épaisseur de complément lui proposer en premier pour l'ajustement.

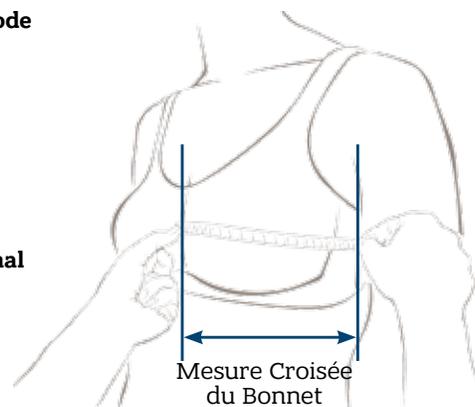

TRUC : Utilisez le côté métrique de votre ruban et mesurez en centimètres (cm). Ce sera toujours la mesure la plus précise.

Mesure Croisée du Bonnet (MCB)	Taille des compléments mammaires												
< 1 cm ou 3/8 po MINCE	OVAL			S		M		L		XL			
	DELTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 - 2 cm ou 3/8 - 3/4 po MOYEN	DELTA	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DELTA			3/4		5/6		7/8		9/10		11/12	

Utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour trouver la bonne taille dans tous les styles de compléments pour commencer votre ajustement.

Trouvez la taille du bonnet et le tour de poitrine, puis suivez la colonne jusqu'à la ligne inférieure pour trouver la taille du complément.


Taille de bonnet	Tour de buste											
AA	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
A	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
B	30		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
C			30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
D			30		32	34	36	38	40	42	44	46
DD			30		32	34	36	38	40	42	44	
DDD			30		32	34	36	38	40	42		
G									34	36	38	40
TAILLE DE COMPLÉMENT MAMMAIRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			S		M		L		XL			
			3/4		5/6		7/8		9/10		11/12	

TABLEAU DES TAILLES POUR LA LINGERIE ET LES MAILLOTS

Comment trouver le bon soutien-gorge

1. Déterminer d'abord le tour de buste pour obtenir la taille de bande. Ensuite, déterminer la mesure du demi-tour de poitrine et multiplier par deux pour obtenir la taille du bonnet. Déterminer la taille exacte de soutien-gorge en regardant la charte ci-dessous.
2. **Prise de mesure du buste :** Alors qu'elle porte un soutien-gorge, mesurer autour de la poitrine tout juste sous le sein.
3. **Prise de mesure du demi-tour de poitrine :** Pour une poitrine unilatérale, trouvez la taille du bonnet en mesurant à partir du milieu de sa poitrine, au niveau du sternum, en passant par-dessus la partie la plus pleine de son sein, jusqu'au centre de sa colonne vertébrale.

Ces tableaux sont ici à titre de guide seulement. Pour un ajustement parfait, choisir une taille plus grande ou plus petite, selon le besoin.

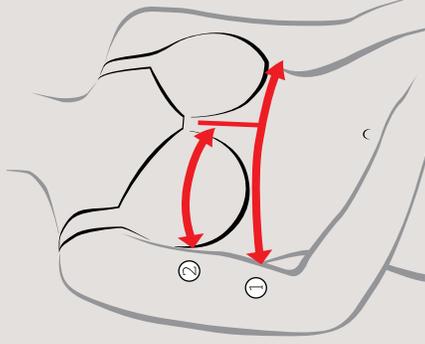

Trucs Pour Ajustement

Bande : La bande devrait être ajustée, sans être trop serrée. Toujours s'assurer que la bande (avant et arrière) est parallèle au sol et plus basse au dos. Si du tissu mammaire dépasse sous la bande, le mieux est d'essayer d'ajuster la taille du soutien-gorge (ex : taille de bande plus basse et taille de bonnets plus élevée).

Bonnet : Si le sein déborde du bonnet, que ce soit au haut, sous la bande ou au centre, le mieux est d'augmenter la taille du bonnet. Toujours s'assurer que le haut du bonnet est bien rempli par le sein ou la prothèse. Le tissu mammaire est très souple et peut s'affaisser dans le fond du bonnet. Si tel est le cas, il faut essayer une taille au-dessous ou un profil de bonnet différent.

Trouvez votre mesure de SOUS-BUSTE pour déterminer le tour de buste ou taille de bande

Underbust measurement	24½-26¼	26¾-28½	28¾-30¼	30¾-32½	32¾-34½	34¾-36¼	36¾-38½	38½-40¼	40½-42	42½-44	44½-46	46½-48
Taille de bande	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

Trouvez votre mesure du DEMI-TOUR DE POITRINE pour déterminer la taille de bonnet

AA	29½-30¼	31½-32¼	33½-34¼	35½-36¼	37½-38¼	39¼-40¼	41¼-42	43¼-44	45¼-46	47¼-48	49¼-50	51¼-52
A	30¼-31	32¼-33	34¼-35	36¼-37	38¼-39	40¼-41	42-43	44-45	46-47	48-48¾	50-50¾	52-52¾
B	31-32	33-33¾	35-35¾	37-37¾	39-39¾	41-41¾	43-43¾	45-45¾	47-47¾	48¾-49½	50¾-51½	52¾-53½
C	32-32¾	33¾-34½	35¾-36½	37¾-38½	39¾-40½	41¾-42½	43¾-44½	45¾-46½	47¾-48½	49½-50½	51½-52¼	53½-54¼
D	32¾-33½	34¾-35½	36¾-37½	38½-39¼	40½-41¼	42½-43¼	44½-45¼	46½-47¼	48½-49¼	50½-51¼	52¼-53	54¼-55
DD	33½-34¼	35½-36¼	37½-38½	39½-40¼	41¼-42	43¼-44	45¼-46	47¼-48	49¼-50	51¼-52	53-54	55-56
DDD	34¼-35	36¼-37	38¼-39	40¼-41	42-43	44-45	46-47	48-48¾	50-50¾	52-52¾	54-54¾	56-56¾
G	35-35¾	37-37¾	39-39¾	41-41¾	43-43¾	45-45¾	47-47¾	48¾-49½	50¾-51½	52¾-53½	54¾-55½	56¾-57½

TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES

Guide pratique de conversion de taille pour les vêtements Amoena (ceci n'est qu'un guide)

Tour de Poitrine	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
Taille de Culotte	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28	
Taille	XS	S/M	M/L	L/XL	XL/2XL								2XL/3XL
Maillot (une pièce et deux pièces)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28	

Tour de Taille	22 ³ / ₄ -24 ¹ / ₂	25-26 ³ / ₄	26 ³ / ₄ -28 ¹ / ₄	28 ³ / ₄ -30	30 ³ / ₄ -32 ¹ / ₄	32 ³ / ₄ -34 ¹ / ₄	34 ³ / ₄ -36 ¹ / ₄	36 ³ / ₄ -38 ¹ / ₄	38 ¹ / ₂ -40 ¹ / ₄	40 ¹ / ₂ -42	42 ¹ / ₂ -44	44 ¹ / ₂ -46
Hip measurement	34 ³ / ₄ -36 ¹ / ₄	36 ¹ / ₄ -37 ³ / ₄	37 ³ / ₄ -39 ¹ / ₄	39 ¹ / ₄ -41	41-42 ¹ / ₂	42 ¹ / ₂ -44	44-45 ³ / ₄	45 ³ / ₄ -47 ¹ / ₄	47 ¹ / ₄ -48 ³ / ₄	48 ³ / ₄ -50 ¹ / ₂	50 ¹ / ₂ -52	52-53 ¹ / ₂

TABLEAU DES TAILLES DE PROTHÈSES MAMMAIRES

Bonnet	Tour de buste													
	AA	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	
A	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
B	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
C	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
D	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		
DD				30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
DDD				30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
G				30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Tout d'abord, mesurez le tour de poitrine et la taille de bonnet correspondante, comme indiqué à la page 83. Ensuite, trouvez la taille de bonnet et le tour de poitrine dans le tableau du haut et suivez la colonne vers le bas pour déterminer la bonne forme de sein Amoena.

Ce tableau des tailles se veut un guide pour vous lors de l'ajustement d'une prothèse mammaire.

Prothèses mammaires Amoena

Adapt Contact Energy Natura Essential

Soins Postopératoires Amoena

Priform et Prothèse de loisir

Purfit

Taille de la prothèse mammaire

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*	16*	17*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	-----	-----	-----

*Disponible dans certains styles Natura et Essential uniquement

Taille de la prothèse mammaire

1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14
4	4	6	8	10	12	12

Breast Shapers

Les instructions complètes pour mesurer et trouver la taille appropriée pour les compléments Balance sont disponibles à la p. 82

amoena

Amoena Canada Inc.
6790 Century Ave., Suite 101
Mississauga ON L5N 2V8



Amoena est une compagnie certifiée ISO 9001/13485/14001.

Amoena est une marque déposée de Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.
©2020 Tous droits réservés Amoena Canada Inc., 6790 Century Ave., Suite 101, Mississauga ON L5N 2V8